

# DPS

Fabricado e distribuído por: DPS - DISTRIBUIÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Endereço: SAAN QD. 02 LOT. 265 CEP: 70632-240 BRASÍLIA -DF

CNPJ: 13.558.813/0001-43 | Tel.: +55 61 3028-8858

Resp. Téc.: Rander P. Avelar | CRO-DF: 5476


## FacMask

FaceMask, máscara para proteção de profissionais da saúde, indústria e outras áreas. Fabricada em copolímero com filtro em SMS50, produto validado e certificado para o uso em contato com a pele, apresenta ótimo custo benefício quando comparada a outras máscaras com respiradores.

A FaceMask é sustentável, higienizável, durável e indicada para uso prolongado, sendo somente necessário fazer a troca dos filtro SMS 50 regularmente.

Registro ANVISA :

EVA - 80861970038 | PVC - 80861970039

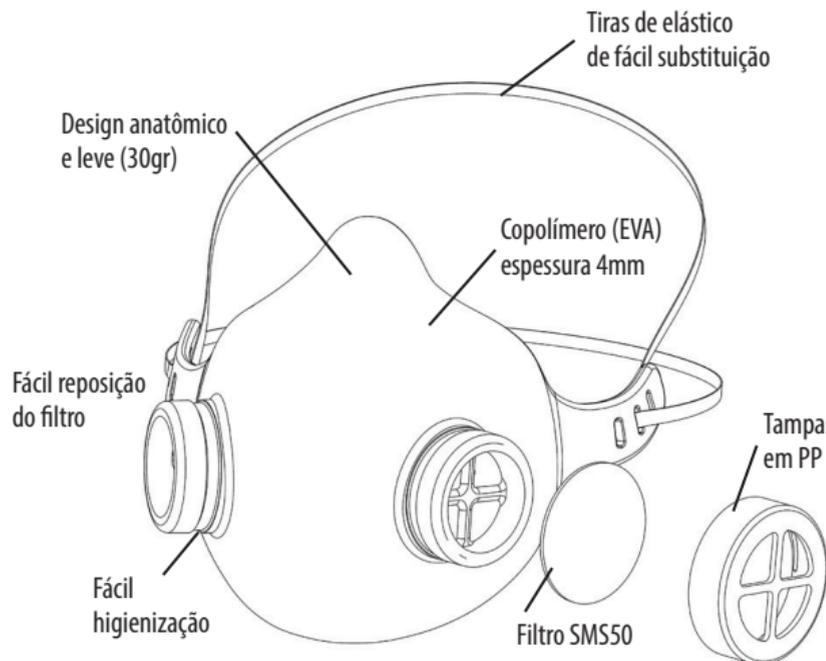



### **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Material: copolímero (EVA) certificado SGS Test Report, N° BR2000866 Rev.0,13/03/2020.
- Filtro: SMS50 (PFF2S N95) conforme NBR 13698:2011 e a NBR 13697:2010.
- Tampa em Polipropileno.
- Fita de elástico 100% elastodieno.



### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

- Não esterilização em alta temperatura (autoclave);
- Usar filtro SMS50 para uso na área da saúde e filtro TNT 80 (multicamadas) para demais áreas;
- A ANVISA recomenda troca dos filtros a cada 12 horas.



### **COMO UTILIZAR**

- Fazer desinfecção antes do uso;
- Verificar o filtro adequado à atividade do usuário;
- Manusear os filtros pelas extremidades, quando for substituir;
- Posicionar sobre o rosto, puxando o elástico atrás da cabeça.



### **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**

- Retire tampa e filtros;
- Descarte os filtros em lixeira apropriada;
- Lave a máscara com sabão e enxague com água em abundância;
- Use toalha de papel ou pano seco para a secagem;
- Para desinfecção, deixar a máscara imersa por 15 minutos em ácido peracético ou álcool 70.