

DPS

Fabricado por: DPS - DISTRIBUIÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Endereço: SAAN QD. 02 LOT. 265 CEP: 70632-240 BRASÍLIA -DF
CNPJ: 13.558.813/0001-43 | Tel.: +55 61 3028-8858
Resp. Téc.: R. P. Avelar | CRO-DF: 5476


Protetor Facial | Face Shield

Protetor para segurança facial, indicado aos profissionais de saúde que devem usar para sua proteção da parte frontal e lateral da face, evitando o contato direto aos aerossóis, respingos de sangue, secreções corporais e excreções que ocorrem durante seus procedimentos.

Produto de uso individual para cada profissional, sendo necessária a higiene correta após o uso.

*** Realizar desinfecção antes do uso.**

Produto conforme RDC ANVISA Nº 356, de 23/03/2020.

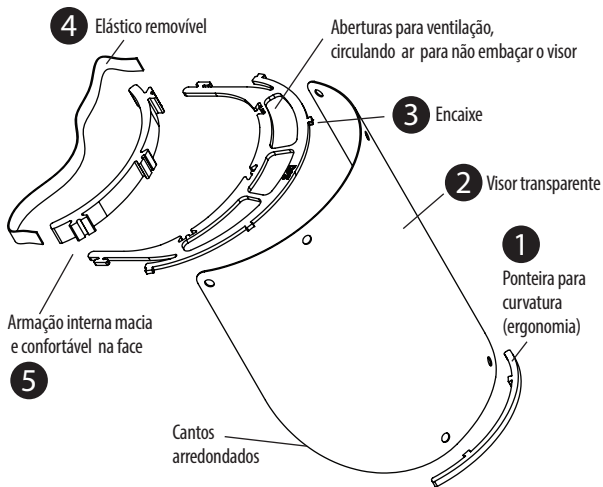



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Armação em acrílico de 3mm;
- Visor transparente em PETG 0,50 com cantos arredondados;
- Armação interna macia que se ajusta perfeitamente aos diferentes contornos faciais e traz maior conforto;
- Ventilação indireta através das aberturas entre a armação e o visor, permitindo a transferência do ar de dentro para fora do protetor e minimiza o embaçamento do visor;



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Não esterilização em alta temperatura (autoclave);
- Realizar a troca do visor quando já estiver com riscos e com dificuldades no campo de visão;
- Não friccionar papel no momento de secagem no visor para não riscá-lo;



COMO UTILIZAR

- Fazer desinfecção antes do uso;
- Verificar o ajuste do elástico estando firme para maior segurança durante a atividade do usuário;
- Possui visores e elástico de fácil reposição;
- Armazenar em local seco e arejado, protegido do calor e de intempéries.



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Retire o visor para higienizar os orifícios de encaixe do mesmo;
- Descarte o visor ad apresentar ranhuras em lixeira apropriada;
- Lave o protetor com sabão e enxague com água em abundância;
- Use toalha de papel ou pano seco para a secagem;
- Para desinfecção, utilizar álcool 70.