

Bandagem Elástica Adesiva Octacare

Descrição:	Código:
Bandagem Elástica Adesiva Octacare 10cm x 4,5m	429104
Bandagem Elástica Adesiva Octacare 15cm x 4,5m	429154
Bandagem Elástica Adesiva Octacare 2,5cm x 4,5m	429024
Bandagem Elástica Adesiva Octacare 5,0cm x 4,5m	429054
Bandagem Elástica Adesiva Octacare 7,5cm x 4,5m	429074

Descrição e Indicação:

A Bandagem Elástica Adesiva Octacare promove a compressão e suporte para ligamentos, músculos, tendões e articulações no tratamento de fraturas e lesões musculares, uma vez que atua em tensão. Alongamento: 150% - 190%; Elasticidade: 70% mínimo de comprimento e Adesividade: $\geq 3.0\text{N}/4\text{cm}$ (0.075N/mm). Respirável, a composição de seu adesivo minimiza ao máximo a irritação na pele, fornece forte adesão com o mínimo de resíduo. Algodão de alta torção, fornece resistência para cintas dinâmicas. Construção porosa, permitindo que a pele respire e a umidade passe.

Advertências:

Armazenar e transportar em local seco e longe de fontes de calor, temperatura 10 - 35°C;

- Não use se a embalagem estiver danificada;
- Não use o produto após a data de validade;
- Não danifique a embalagem para garantir a segurança do produto.

O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.

Fotos:



Composição:

A Bandagem Elástica Adesiva Octacare é produzida com tecido 100% de algodão com alta elasticidade.

A camada adesiva porosa é constituída de óxido de zinco e borracha sintética (não contém látex natural).

A massa adesiva não contém resinas ou gomas naturais que representem potencial alergênico (Latex Free).

O fio de algodão apresenta alta torção e alta resistência;

A linha central amarela no tecido atua como guia de sobreposição para aplicação e pressão uniformes.

Instruções de Uso:

1. Prepare e limpe a pele onde a Bandagem Elástica Adesiva Octacare será aplicada.

Excesso de pelos deve ser tricotomizado para garantir bom contato com a pele.

2. Aplique a Bandagem sobre a pele no local em que é preciso fazer a compressão;

3. Selecione o tamanho apropriado cortando-o com uma tesoura.

4. Fixe a bandagem pressionando-a levemente do centro para as bordas.

5. A linha central amarela no tecido atua como guia de sobreposição para aplicação e pressão uniformes.

6. Tempo de permanência: 3-7 dias

Descartável / Não estéril

Registro Anvisa: 81760450003

Prazo de Validade: 02 Anos

Fabricante: OCTAMED SAGLIK URUNLERI SAN. VE TIC.A.S.

Importado: Net Medical Comércio de Correlatos Médicos e Hospitalares LTDA

Distribuído: Express Medical Comércio Atacado e Varejista de Correlatos Médicos LTDA

Avenida Fagundes Filho, 191 – Edifício Dallas – Vila Monte Alegre

Responsável Técnica: Dra. Marcela Vicentini Cardoso – Coren 233.085