

	FICHA TÉCNICA	Emitido: Junho 2022
--	----------------------	------------------------

ESPUMA DE POLIURETANO PARA TRAQUEOSTOMIA NETFOAM TRAQUEO

Descrição: Espuma Poliuretano para Traqueostomia NetFoam 6cmx9 cm Espuma Poliuretano para Traqueostomia NetFoam 8cmx9.5 cm	Código: A060001 A060002
---	--------------------------------------

Descrição e Indicação:


A Espuma de Poliuretano (PU) para Traqueostomia NetFoam é um curativo de espuma de poliuretano projetado para pacientes com traqueostomia, com o objetivo de absorver e reter a umidade peri-traqueo, proteger a pele e proporcionar conforto e segurança ao paciente.

A superfície do curativo é coberta por uma camada de filme de PU semipermeável, permeável ao vapor da umidade, permitindo sua evaporação, e impermeável à água e bactérias. A parte da almofadada de espuma absorvente em contato com a pele é macia e elástica, permitindo a absorção da umidade de forma eficiente, deixando a pele seca e protegida e conforto ao paciente.

Advertências:

Não danifique a embalagem para garantir a segurança do produto.
O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO, não deve ser reutilizável.

Fotos:

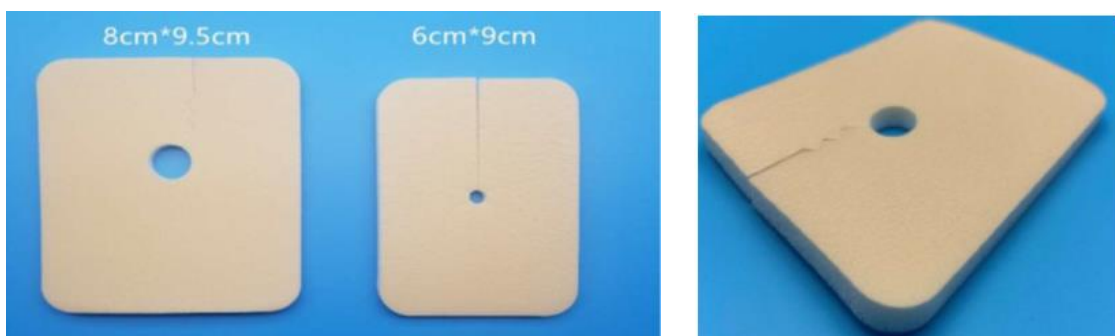

Composição:

Filme de poliuretano impermeável, espuma de poliuretano hidrofílica.

Instruções de Uso:

A Espuma de Poliuretano para Traqueostomia NetFoam deve ser usada seguindo a orientação abaixo:

- Com as mãos protegidas por luvas, limpar ao redor do óstio da traqueo e pele peri-traqueo com gaze embebida com solução fisiológica ou conforme protocolo da instituição;
- Secar a pele ao redor;
- Adaptar o fixador na fenda da Espuma de Poliuretano para Traqueostomia NetFoam;
- Soltar um lado do fixador e colocar um novo;
- Retirar o fixador sujo e fixar o outro lado do novo fixador ajustando sem apertar.



Frequência de Troca:

A troca deverá ser feita antes que o curativo fique saturado.

Condições de Armazenamento:

Em embalagem íntegra. Armazenar em local fresco, longe do calor e da luz solar.
Estétil – Esterilizado por radiação Gama

Registro Anvisa: 81760450002

Prazo de Validade: 5 anos

Fabricante: Ningbo Chinmed Technology Co., Ltd

Importador: Net Medical Comércio de Correlatos Médicos e Hospitalares LTDA

Distribuído: EXPRESS MEDICAL - COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELATOS MÉDICOS LTDA ME. AV FAGUNDES FILHO 191 CONJ 123 E 124 - São Paulo

Responsável Técnica: Dra. Marcela Vicentini Cardoso – Coren: 233.085