

BANDAGEM AUTOADERENTE COESIVA NETFLEX

Descrição: Bandagem autoaderente Coesiva NetFlex 2,5cm x 4,5m Bandagem autoaderente Coesiva NetFlex 5cm x 4,5m Bandagem autoaderente Coesiva NetFlex 7,5cm x 4,5m Bandagem autoaderente Coesiva NetFlex 10cm x 4,5m Bandagem autoaderente Coesiva NetFlex 15cm x 4,5m	Código: HDCO01 HDCO02 HDCO03 HDCO04 HDCO05
---	--

Descrição e Indicação:

A Bandagem Autoaderente Coesiva NetFlex atua como fixador para curativos e dispositivos, como protetor e estabilizador de diversas regiões do corpo durante a prática esportiva, promovendo a compressão nas áreas lesadas.

Advertências:

- ❖ A Bandagem Autoaderente Coesiva NetFlex deve ser armazenada em ambiente seco, longe de umidade e luz solar direta, em temperatura ambiente, Evite calor excessivo e umidade;
- ❖ Não use se a embalagem estiver danificada;
- ❖ Se houver alguma reação alérgica, pare de usar imediatamente. Com cuidado especial para aqueles que são alérgicos ao látex natural;
- ❖ Não coloque muita compressão para evitar prejudicar a circulação e causar ferimentos graves;
- ❖ Monitore a área frequentemente (pelo menos a cada 24 horas) em busca de sinais de inchaço, descoloração, dor, dormência, formigamento ou outras alterações na sensação. Se estes ocorrerem, remova imediatamente e entre em contato com seu médico;
- ❖ NÃO coloque o envoltório autoadesivo em contato direto com uma ferida aberta porque pode levar à infecção.

Pessoas alérgicas ao látex natural não devem usar bandagens coesivas de látex - Este tipo de produto não pode ter contato direto com a ferida.

Fotos:





FICHA TÉCNICA

Emitido:
Março 2024

Composição:

95% não tecido + 5% elastano, Cola de látex médica.

Instruções de Uso:

Esta bandagem não pode entrar em contato direto com a ferida.

- ✓ Abra a embalagem, retire a bandagem, desenrole cerca de 30 cm ou mais da bandagem e corte;
- ✓ Para a primeira volta, não estique a bandagem, segure a sobreposição com o polegar para fixar a ponta e, em seguida, ajuste o esticamento a bandagem;
- ✓ Tenha cuidado para não apertar demais para não afetar a circulação sanguínea;
- ✓ Nos últimos 5-8cm da bandagem, não estique e segure para fazê-la grudar em si mesma.

Registro Anvisa: 81760450008

Prazo de Validade: 03 Anos

Reprocessamento PROIBIDO – Fabricante recomenda uso único

Embalagem Unitária – Caixa com 12

Fabricante: ANJI HONGDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. Building 1,3,4,5, Bamboo Industry Science and Technology Innovation Center, Xiaofeng Town, Anji Country, Zhejiang Province, China. TEL: 0086-572-5121999 FAX: 0086-572-5121708

Detentor do Registro: Net Medical Comércio de Correlatos Médicos e Hospitalares Ltda
CNPJ 25.390.019/0001-12 Av. Fagundes Filho, 191 Conj. 21 São Paulo CEP 04340-010
Telefone: (11) 4118-4045

Responsável Técnica: Dra. Marcela Vicentini Cardoso – Coren: 233.085