

FITA KINÉSIO NETTAPE

Descrição:	Código:
Fita Kinésio NetTape 2,5 cm x 5mts	HDKT01
Fita Kinésio NetTape 3,8 cm x 5mts	HDKT02
Fita Kinésio NetTape 5,0 cm x 5mts	HDKT03
Fita Kinésio NetTape 5,0 cm x 5mts pré cortada a cada 25cm	HDKT03 - PC
Fita Kinésio NetTape 7,5 cm x 5mts	HDKT04
Fita Kinésio Nettape 10 cm x 5mts	HDKT05

Descrição:

A fita Kinésio é um tipo de adesivo elástico que pode ser usado para tratar lesões esportivas e algumas outras doenças. Tem sido amplamente utilizado em medicina esportiva e reabilitações. A Bandagem Kinesio NetTape proporciona compressão e dá apoio aos ligamentos, músculos e articulações.

Indicação:

Serve para relaxar ou fortalecer o músculo usando a elasticidade elástica da própria fita.

1. Em primeiro lugar, a fita kinesiológica não é medicinal. Por exemplo, como o adesivo superfície que está ligada à pele, nosso adesivo muscular é um acrílico hipoalergênico adesivo com alta aceitação, e o usuário geralmente não possui alergias.
2. A fita kinesiológica tem elasticidade, existe um certo grau de tensão.
3. A fita kinesiológica tem alto conforto e alta drenagem
4. A fita kinesiológica possui características consideráveis à prova d'água (anti-água).

Características

1. Relaxamento e contração muscular
2. Promove a circulação sanguínea e linfática
3. Reduza o inchaço
4. Correção de deslocamento
5. Aliviar a dor

Advertências:

Se houver algum desconforto durante o uso, pare de usar imediatamente.

Fotos:





FICHA TÉCNICA

Emitido:
Outubro 2024

Composição:

95% algodão + 5% elastano

Cola Acrílica Médica

Instruções de Uso:

Precisa ser colado para frente ou para trás de acordo com a textura, em vez de diretamente na área afetada. Necessitando de assistência profissional ou orientação.

1. Limpe a superfície da pele antes da aplicação
2. Se houver ferimento na pele, evite aplicá-lo diretamente no local.
3. A Fita pode tocar na água. Se puder ser seco com uma toalha ou seco com um secador de cabelo depois de tomar banho, é bom.
4. Ao cortar, os quatro cantos do pano podem ser aparados, o que pode reduzir o situação rolante.

Ao tomar banho, não esfregue vigorosamente a parte adesiva nem dobre a borda do pano, geralmente não cairá. Por exemplo, nossas tiras musculares geralmente podem ser retidas no corpo por 1-2 dias, desde que não haja uso indevido.

Este produto deve ser armazenado em temperatura ambiente.

Evite calor excessivo e Umidade

Registro Anvisa: 81760450009

Prazo de Validade: 03 anos

Reprocessamento PROIBIDO – Fabricante recomenda uso único

Embalagem: Unitária

Fabricante: ANJI HONGDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. Building 1,3,4,5, Bamboo Industry Science and Technology Innovation Center, Xiaofeng Town, Anji Country, Zhejiang Province, China. TEL: 0086-572-5121999 FAX: 0086-572-5121708

Detentor do Registro: Net Medical Comércio de Correlatos Médicos e Hospitalares Ltda
CNPJ 25.390.019/0001-12 Av. Fagundes Filho, 191 Conj. 21 São Paulo CEP 04340-010
Telefone: (11) 4118-4045

Responsável Técnica: Dra. Marcela Vicentini Cardoso – Coren: 233.085