

# Manual Ventosa de Glúteo Plus Pump



# Hidrosux

## VENTOSA PLUS PUMP

Parabéns,

Pela escolha, esperamos que esse equipamento seja muito vantajoso em seu trabalho, proporcionando mais agilidade e benefícios a suas clientes.

A **VENTOSA PARA GLÚTEO PLUS PUMP** é utilizada para:

- Tonificação dos Glúteos
- Circulação Sanguínea
- Celulite
- Modelagem do corpo

Um dos maiores desejos femininos é ter um bumbum bonito em pouco tempo e sem muito esforço. A técnica é indolor e combinada com a vacuoterapia proporciona efeitos considerados surpreendentes. Para o procedimento é indicado o tempo de 20/30 minutos com ventosas presas às nádegas, efetuando a sucção do músculo que poderá ser feito no ritmo contínuo ou pulsado, pressão aplicada deve ser verificada de acordo com a sensibilidade da cliente.

O uso das ventosas estimula a região, modelando o glúteo. Isso, além de ajudar a empinar o bumbum tem um efeito intenso nas celulites mais severas. Após terminar a primeira sessão já é possível observar os primeiros resultados, com a região mais empinada e enrijecida. De acordo com estudos científicos, cada 30 minutos de vacuoterapia equivale a mil repetições de exercícios localizados.

### Contraindicações:

O procedimento é contraindicado somente para pessoas com problemas circulatórios.

- ✓ Tumores
- ✓ Doenças infecciosas
- ✓ Gravidez
- ✓ Infecções na pele
- ✓ Tratamento com anticoagulantes
- ✓ Flebites, trombozes, hérnias e varizes.

### Características Técnicas:

2 Ventosas de Acrílico com conector

1 Conector “T”

2 Mangueiras

### Montagem

1-Acoplar o pedaços de mangueira ao conector “T” deixando o conector central livre (Imagem 01)

2-Acoplar as mangueira no conector da ventosa de glúteo (Imagem 02);

3-Acoplar a mangueira do aparelho de vácuo no conector “T” da ventosa (Imagem 03);

4-Posicionar a ventosa no glúteo e ligar o aparelho de vácuo (Imagem 04);



**INFORME:** Não nos responsabilizamos pelo uso inadequado do equipamento, bem como seus acessórios por profissionais não capacitados, para um procedimento adequado e satisfatório é essencial ao profissional à conclusão do curso e experiência constante. Ao adquirir um aparelho, indicamos que faça também o curso disponibilizado pela empresa Hidrosux.



MR LUIZ - APARELHOS ESTÉTICOS - ME  
Fone (44) 3301-8634  
Whatsapp (44) 99908-0142 | 99908-0148  
CPNJ 12.578.816/0001-86

A HIDROSUX deseja um bom trabalho a você  
em caso de dúvidas não deixe de nos consultar.

**Informações:** [contato@hidrosux.com.br](mailto:contato@hidrosux.com.br)  
[hidrosux@hidrosux.com.br](mailto:hidrosux@hidrosux.com.br)

[www.hidrosux.com.br](http://www.hidrosux.com.br)

