

PEEZY



PEEZY LIGHT

PEEZY / PEEZY LIGHT
MANUAL DO USUÁRIO

2023-03



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE



PRODUTO	PEEZY / PEEZY LIGHT	
IDENTIFICATIVO ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE / NÚMERO DE PEÇA DO FABRICANTE		S211
EMDN	Y180939 SISTEMAS MODULARES DE POSTURA	
UTILIZAÇÃO PREVISTA / UTILIZAÇÃO PRETENDIDA	O produto destina-se a ser utilizado para atenuar ou compensar uma lesão ou deficiência. Em particular, o objetivo é oferecer suporte postural para a pelve do usuário.	O produto destina-se a ser utilizado para atenuar ou compensar uma lesão ou deficiência. Em particular, o objetivo é oferecer apoio postural para a pelve do usuário.
FABRICANTE		Neatech.it s.r.l. via Antonio de Curtis 4/A – 80040 Cercola (NA) – Itália Tel. +39 081 5551946 –info@neatech.it – www neatech.it P. IVA IT04812481218 – REA NA 715393 Identificação do agente Eudamed/SRN IT-MF- 000031601
UDI DI BASE / NÚMERO UDI BÁSICO	805538493S211CC	
UDI DI / NÚMERO UDI DI	8055384930087	

Índice

1	INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO.....	1
2	PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	3
2.1	Montagem na cadeira de rodas	5
3	AJUSTES.....	6
3.1	Lista de ajustes	6
4	UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.....	7
4.1	Utilização num veículo motorizado.....	7
4.2	Transporte e armazenamento.....	8
5	MANUTENÇÃO	9
1.1.	Limpeza	9
5.1	Controles a realizar no produto	10
5.2	Reutilização.....	10
6	ESPECIFICAÇÕES	11
6.1	Peso máximo do usuário.....	11
6.2	Dimensões e peso	12
7	TERMOS DA GARANTIA.....	14
7.1	Número de série.....	15
	Nota	16



Preocupamo-nos muito com a qualidade, segurança e usabilidade dos nossos produtos. Estamos sempre a trabalhar para melhorá-los. Faça o download da versão mais recente deste manual neste link.

<https://www.neatech-download.it/s211-manual/>

Símbolos neste manual



AVISO

Este símbolo significa a presença de perigo para o usuário ou danos para o produto. Siga sempre as instruções quando este símbolo estiver presente.



INFORMAÇÃO

Este símbolo significa informação geral destinada a simplificar ou explicar melhor a utilização do produto.



INFORMAÇÕES DE CONTACTO

Este símbolo significa a necessidade de contatar um centro de assistência autorizado ou o fabricante.



COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES

Se ocorrer um incidente, contate o fabricante/distribuidor.



Para obter avisos de segurança do produto e recalls de produtos, por exemplo, garantindo que o fornecedor tenha detalhes de contato atualizados, visite o site do fabricante.



CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO

Para obter uma lista de centros de assistência autorizados, contate o fabricante.



Este produto e todos os seus componentes não podem ser tratados como resíduos domésticos. Para obter informações mais detalhadas sobre como reciclar e descartar este produto, contate o serviço local de eliminação de resíduos.



Qualquer modificação não autorizada no produto pode aumentar o risco de ferimentos pessoais e danos ao próprio produto. Todas as modificações devem ser feitas por um centro de assistência autorizado. Não utilize acessórios ou peças sobressalentes não autorizados no produto.



Não utilize o produto em combinação com outros dispositivos médicos sem primeiro ter considerado qualquer risco devido à combinação de mais produtos. Preste especial atenção à combinação de materiais resistentes ao fogo e não resistentes ao fogo.



AVISO: É proibido utilizar o produto ou as suas peças para qualquer finalidade que não seja a indicada. Para uma utilização correta, siga as instruções fornecidas neste manual. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização indevida do produto.



As informações contidas neste manual podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as informações, imagens e especificações baseiam-se nos detalhes do produto disponíveis no momento da elaboração deste documento. São exemplos representativos e não pretendem ser exatamente iguais ao produto real.



A utilização deste produto numa cadeira de rodas pode alterar a posição do centro de gravidade do sistema cadeira de rodas + usuário, com consequente aumento do risco de capotamento. Considere a possibilidade de adicionar dispositivos antiderrapantes à cadeira de rodas.



Além das indicações fornecidas neste manual, siga sempre as indicações do manual da cadeira de rodas na qual está montado. Em caso de discrepância, entre em contato com o fabricante.



TEMPERATURA

A temperatura de algumas superfícies pode aumentar quando o produto é exposto a fontes de calor externas, como a luz solar direta.



INFORMAÇÃO

Para obter informações sobre como obter informações e instruções num formato adequado para utilização por pessoas com deficiência visual, contate o fabricante.



Não utilize o produto se estiver a funcionar de forma anormal ou irregular.



Não instale, faça a manutenção ou utilize o produto sem ler todos os avisos e este manual na íntegra.

Mantenha sempre este manual junto com o produto.



O produto não se destina a ser desmontado. Não há peças do produto que devam ser manuseadas durante o uso normal do mesmo.



AVISO

Se ocorrer qualquer vermelhidão ou lesão na pele possivelmente relacionada com o uso do produto, interrompa o uso o mais rápido possível e entre em contato com um técnico com conhecimentos em reabilitação.



POSSÍVEIS EFEITOS NEGATIVOS

Verifique frequentemente a pele do utilizador nas zonas de contato com o produto, com o objetivo de descobrir o mais rapidamente possível a formação de escaras. Nesse caso, interrompa o uso do produto o mais rapidamente possível e contate um técnico com conhecimentos de reabilitação ou um médico.

1 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Peezy é uma almofada de base plana extremamente modular, totalmente fabricada em material PU de alta qualidade, que pode ser adaptada a cada usuário.

É particularmente adequada para pacientes que necessitam de contenção lateral e traseira.

É possível colocar a almofada num assento tipo sling ou numa base rígida e, com um sistema antiderrapante, apresenta uma capa têxtil respirável e elástica e tem um confortável enchimento de espuma viscoelástica e PU respirável, para garantir maior conforto ao usuário.

Especialmente a cobertura sem costuras, presente em todos os sistemas de posicionamento da linha Buddy Brace, garante que não haja danos à pele.

Peezy, em última análise, foi estudado como um conjunto de inserções simples e ajustáveis, para serem compostas em blocos de acordo com as necessidades mais específicas do usuário.

- Estofamento sem costuras e respirável
- Peso máximo do usuário 150 kg
- Largura do assento de 26 cm a 48 cm
- Profundidade do assento de 30 cm a 52 cm
- 2 anos de garantia

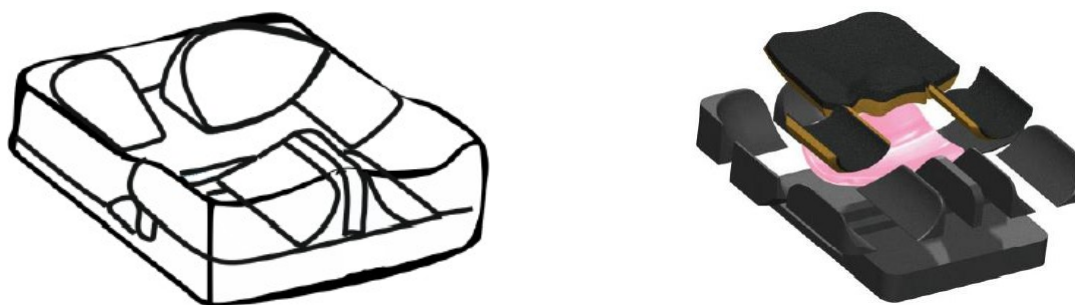


Figura 1

A versão Peezy Light é uma versão mais simples, com um número menor de inserções, adequada especialmente para usuários com necessidades posturais menos graves.

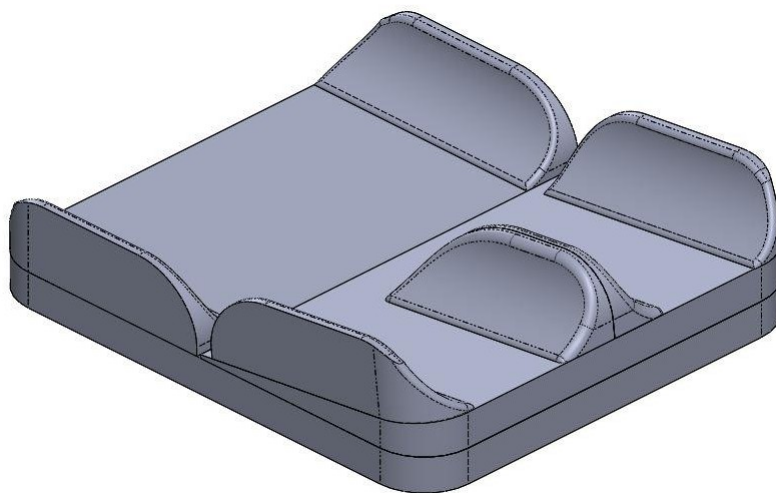


Figura 2

2 PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Dentro da caixa encontram-se: • Assento PEEZY • Manual	 ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM Para reciclar corretamente os materiais da embalagem, siga as instruções fornecidas pelo serviço local de eliminação de resíduos.
---	--

O produto é entregue já montado e pronto para uso. Antes de começar a usar o produto, verifique se todos os componentes descritos estão presentes. **Caso contrário, contate o vendedor o mais rapidamente possível.** É recomendável que a primeira configuração seja realizada por um centro de assistência autorizado.

A almofada é fornecida montada e pronta para usar. Para a sua utilização, é necessária uma cadeira de rodas como base, com uma lona ou um plano rígido onde colocar a almofada.

A base da almofada possui algumas fitas adesivas com velcro para ajudar na fixação. É necessário montar na cadeira de rodas as fitas adesivas fornecidas com ganchos colocados como os da almofada.

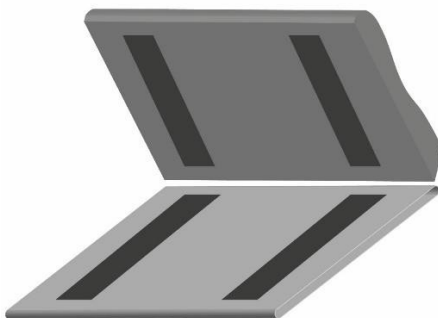


Figura 3

AVISO

Certifique-se de colocar a almofada na cadeira de rodas na direção correta.
(veja a figura, a parte frontal está à direita)



PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO

É muito importante realizar a primeira configuração do produto com a supervisão de um técnico com conhecimentos de reabilitação, com o objetivo de descobrir quaisquer problemas ou necessidades de ajustes e personalização relacionados com a utilização do produto.



AVISO

Se ocorrer qualquer vermelhidão ou lesão na pele possivelmente relacionada com a utilização do produto, interrompa a utilização do produto o mais rapidamente possível e contate um técnico com conhecimentos de reabilitação.



O produto deve ser montado numa cadeira de rodas com um suporte adequado.

2.1 Montagem na cadeira de rodas

A almofada deve ser montada numa cadeira de rodas com uma base adequada.

A base deve ser de lona ou um plano rígido.

A largura da base deve ser igual ou superior à largura da almofada a ser montada. A profundidade da base deve ser igual ou superior à profundidade da almofada a ser montada.



AVISO

Siga sempre as instruções do fabricante da cadeira de rodas. Em qualquer caso:

- Aplique os freios da cadeira de rodas e certifique-se de que está bem bloqueada.
- Se a cadeira de rodas for dobrável, abra-a sempre.




AVISO

Certifique-se de colocar a almofada na cadeira de rodas na direção correta. (veja a figura, a parte da frente está à direita)



VERSÃO PEEZY

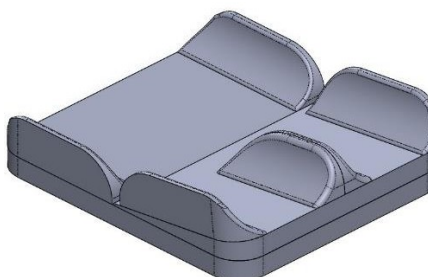

VERSÃO PEEZY LIGHT

3 AJUSTES



3.1 Lista de ajustes

Tipo de operação	
C	Operação destinada a ser realizada por um .

Tabela 1

Ajuste	Tipo de operação
Largura da área das pernas	C - Centro de assistência autorizado
Profundidade da área pélvica* *apenas para a versão Peezy. Não é possível realizar este ajuste com a versão Peezy Light	C - Centro de assistência autorizado
Largura da área pélvica	C - Centro de assistência autorizado
Abdutor e posição lateral apertada	C - Centro de assistência autorizado Centro de assistência
Ângulo do assento *apenas para a versão Peezy. Não é possível realizar este ajuste com a versão Peezy Light	C - Centro de assistência autorizado

Tabela 2

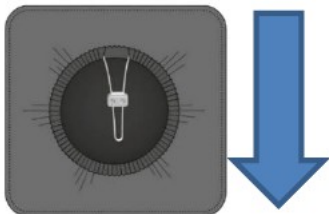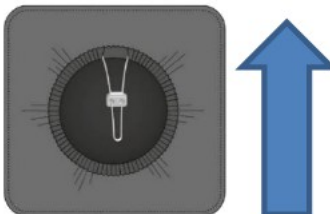REMOVER ESTOFAMENTO  Para remover o estofamento, puxe o bloqueio para baixo, conforme mostrado na figura.	MONTAR O ESTOFAMENTO  Para montar o estofamento, puxe o sistema de bloqueio para cima, conforme ilustrado na figura.
---	---

4 UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

4.1 Utilização num veículo motorizado

A almofada está em conformidade com a norma ISO 16840-4:2008 e é adequada para utilização num veículo motorizado quando utilizada com uma cadeira de rodas adequada como base.

Para montagem, utilização, manutenção e quaisquer limitações na utilização do produto, consulte o manual da cadeira de rodas utilizada como base.

Recomenda-se usar tanto o cinto de segurança pélvico quanto o cinto de segurança de ombro.



AVISO

O produto só pode ser utilizado num veículo motorizado com uma cadeira de rodas em conformidade com a norma ISO 7176-19 utilizada como base.



AVISO

O produto só pode ser utilizado num veículo motorizado virado para a frente.



AVISO

Se a cadeira de rodas utilizada como base tiver uma bandeja, deve removê-la e fixá-la separadamente no veículo.



AVISO

Siga sempre as instruções deste manual e as instruções do manual da cadeira de rodas utilizada como base.



AVISO

Devem ser utilizados cintos de segurança pélvicos e de ombro em conformidade com a norma ISO 10542-1 para garantir uma retenção eficaz do utilizador e uma proteção ideal em caso de impacto do veículo.

Os cintos de segurança devem ser ajustados de acordo com as instruções do fabricante.



AVISO

Não deve utilizar este produto num veículo motorizado se o seu peso for inferior a 22 kg.

4.2 Transporte e armazenamento

O produto pode ser transportado no bagageiro do veículo, mesmo sem qualquer embalagem. O produto também pode ser enviado por via aérea. Se for necessário enviar o produto, é muito importante protegê-lo com uma embalagem adequada.

Não é possível fornecer uma embalagem universal, pelo que o utilizador deve providenciá-la por conta própria. A embalagem utilizada deve ser resistente à água e ao pó e suficientemente forte para proteger o produto contra danos. Ao inserir o produto na embalagem, proteja quaisquer partes salientes com espuma ou material semelhante.

Se não pretender utilizar a cadeira de rodas por um longo período, mantenha-a em segurança numa área limpa e longe do calor.

5 MANUTENÇÃO

Abaixo estão algumas precauções para o uso da cadeira de rodas, que é recomendável seguir, a fim de garantir um uso seguro e uma longa durabilidade.

A manutenção regular ajuda a manter intactas a funcionalidade e a segurança do produto. Cuidados e manutenção inadequados ou insuficientes podem causar uma limitação da garantia.

- Evite o contato prolongado do produto com água. Isso pode causar oxidação das peças metálicas.
- Evite a exposição prolongada do produto à luz solar direta.



AVISO

Qualquer intervenção no produto deve ser realizada por um centro de assistência autorizado.



INFORMAÇÃO

Não é possível realizar qualquer manutenção nas baterias. Apenas é possível substituí-las. Não aplicável.

1.1. Limpeza

Para limpar o produto, não utilize dispositivos de pulverização de água a alta pressão. Para os estofamentos, utilize água morna e detergente suave. Não utilize removedores de manchas, solventes, ácidos, etc.

Limpe todas as partes do produto separadamente: separe as partes de tecido da chapa metálica.

ESTOFAMENTOS	 Lavar na máquina com água quente a 60 °C	 Secar ao ar livre	 Não torcer	 Não usar lixívia
ESPUMA	Primeiro, remova o estofamento. Limpe a espuma com um pano úmido. Não use nenhum tipo de sabão ou detergente. Não coloque a espuma diretamente na água. Antes de colocar a espuma de volta, certifique-se de que ela esteja completamente seca.			

5.1 Controles a realizar no produto

Tipo de operação	
A	Operação destinada a ser realizada pelo usuário.
B	Operação destinada a ser realizada por um assistente.
C	Operação que deve ser realizada por um centro de assistência autorizado.

Operação	Frequência	Tipo de operação
Limpe o produto	Semanalmente	B - Assistente

5.2 Reutilização

O produto é adequado para reutilização. Antes de o comercializar, o produto deve ser limpo e submetido a manutenção. As instruções de funcionamento estão incluídas neste manual e também devem ser fornecidas quando o produto for transferido.



AVISO

Esta operação deve ser efetuada somente num centro de assistência autorizado.

p p v

6 ESPECIFICAÇÕES



Peso máximo do usuário	150 kg
Vida útil prevista [anos]	5

6.1 Peso máximo do usuário



Largura do assento	Peso máximo do utilizador
26 cm	50 kg
30 cm	50 kg
34 cm	75 kg
36 cm	75 kg
38 cm	100 kg
42 cm	150 kg
44 cm	150 kg
48 cm	150 kg

Tabela 3

6.2 Dimensões e peso

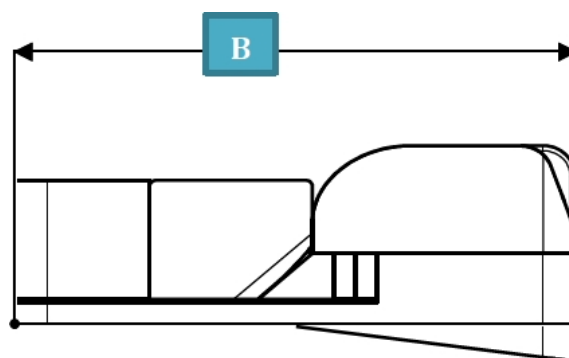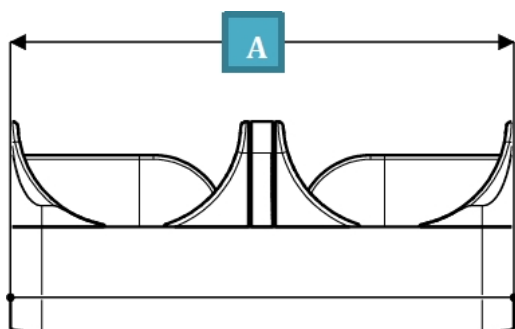

VERSÃO PEEZY

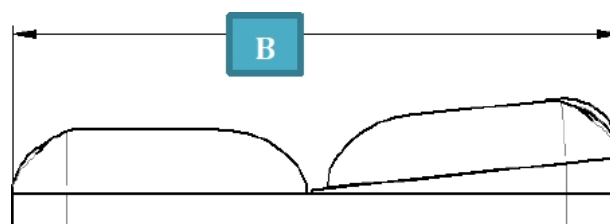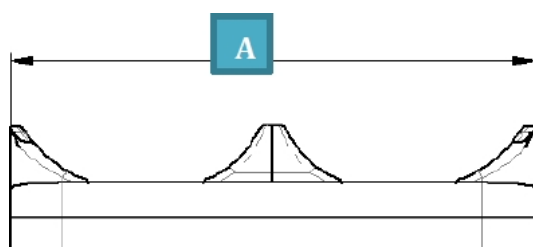

VERSÃO PEEZY LIGHT

TAMANHO DA ALMOFADA	(A) LARGURA	(B) PROFUNDIDADE
P1	26 cm	30 cm
P2	30 cm	34 cm
P3	30 cm	40 cm
P4	34 cm	44 cm
P5	36 cm	44 cm
P6	38 cm	48 cm
P7	42 cm	44 cm
P8	42 cm	52 cm
P9	44 cm	50 cm
P10	48 cm	52 cm

Tabela 4

TAMANHO DA ALMOFADA	ESTOFAMENTO E CAPAS ESPUMAS PESO	INSERÇÕES E PESO BÁSICO	PESO TOTAL
P1 Peezy	0,4 kg	0,5 kg	0,9 kg
P2 Peezy	0,5 kg	0,6 kg	1,1 kg
P3 Peezy	0,6 kg	0,7 kg	1,3 kg
P4 Peezy	0,8 kg	1,1 kg	1,9 kg
P5 Peezy	0,9 kg	1,2 kg	2,1 kg
P6 Peezy	1,0 kg	1,4 kg	2,4 kg
P7 Peezy	1,1 kg	1,5 kg	2,6 kg
P8 Peezy	1,3 kg	1,8 kg	3,1 kg
P9 Peezy	1,4 kg	1,9 kg	3,3 kg
P10 Peezy	1,5 kg	2,2 kg	3,7 kg
P1 Peezy Light	0,4 kg	0,3 kg	0,7 kg
P2 Peezy Light	0,5 kg	0,4 kg	0,9 kg
P3 Peezy Light	0,6 kg	0,5 kg	1,1 kg
P4 Peezy Light	0,8 kg	0,7 kg	1,5 kg
P5 Peezy Light	0,9 kg	0,8 kg	1,7 kg
P6 Peezy Light	1,0 kg	0,9 kg	1,9 kg
P7 Peezy Light	1,1 kg	0,9 kg	2,0 kg
P8 Peezy Light	1,3 kg	1,1 kg	2,4 kg
P9 Peezy Light	1,4 kg	1,1 kg	2,5 kg
P10 Peezy Light	1,5 kg	1,3 kg	2,8 kg

Tabela 5



AVISO

Os dados podem variar de acordo com a personalização específica do produto e devido a tolerâncias e erros de cálculo.

7 TERMOS DA GARANTIA

Definições

- **FABRICANTE:** Fabricante significa a pessoa jurídica que fabrica um produto. Para os fins do presente documento, o fabricante é:

Neatech.it s.r.l.

via Antonio de Curtis 4/A — 80040 — Cercola (NA)

Tel. +39 081 555 1946 — info@neatech.it — neatech@pec.it — www.neatech.it P.IVA

IT04812481218 — REA NA715393

- **CLIENTE:** Cliente significa a pessoa singular ou coletiva que compra um produto do fabricante/distribuidor. Para efeitos do presente documento, o Cliente é o titular do documento fiscal emitido pelo distribuidor após o fornecimento do produto.
- **PRODUTO:** O produto é o bem fornecido pelo fabricante/distribuidor ao cliente em execução de uma ordem de compra.

Âmbito da garantia

O fabricante compromete-se a reparar qualquer defeito, falta de qualidade ou falta de conformidade dos produtos que lhe dizem respeito, resultantes de erros de fabricação, construção ou defeitos do material ocorridos durante o período de garantia.

Período de aplicação da garantia

O período de garantia começa na data de faturação do cliente. A duração do período de garantia varia de acordo com o tipo de produto.

Tipo de produto	Período de garantia [meses]
Sistemas posturais	24

Tabela 6

Quaisquer reparações ou substituições ao abrigo da garantia não alteram o período original de aplicação da garantia.

Exclusões

A garantia não cobre peças de desgaste.

Seguem-se alguns exemplos de peças sujeitas a desgaste.

- Rodas
- Peças acolchoadas (espumas de poliuretano, viscoelásticas)
- Estofos (incluindo lona)
- Puxadores e botões
- Fusíveis e lâmpadas
- Escovas de motor elétrico
- Filtros

A garantia limita-se aos danos relacionados com o produto e não pode, em circunstância alguma, cobrir danos causados a terceiros como resultado de uma avaria do produto.

A garantia não cobre peças danificadas por sobrecarga, uso inadequado, alterações e reparações feitas por terceiros não autorizados. A garantia não é válida em caso de adulteração, armazenamento incorreto, manutenção incorreta ou não autorizada.

7.1 Número de série

Para qualquer relatório ou pedido de assistência, comunique o número de série mencionado na etiqueta.

Nota

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Importado e distribuído por: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA REABILITAÇÃO LTDA. CNPJ 58.895.681/0001-83. Rua Ernesto Bristotti Nº 41 - Jardim Myriam - Campinas/SP. CEP: 13.098-408. AFE ANVISA nº 8.11.374-2. Resp. Técnico: Lidyane Santos do Nascimento CREFITO/SP 169.759-F. Registro ANVISA nº 81137420027. Serviço de atendimento do consumido SAC: (19) 3304-2500 / sac@maismovimento.com.br.

versão 2 deste manual do usuário.



BUDDY BRACE

BUDDY BRACE

website: www.buddybrace.com

e-mail: info@buddybrace.com