




MULTIX

MANUAL DO USUÁRIO

2022-02



PRODUTO	MULTIX
NÚMERO DE PEÇA/MODELO	S224
CONFORMIDADE CE	 Regulamento UE 2017/745 - Dispositivo médico de Classe I - Regra I Anexo VIII
PRINCIPAIS NORMAS APLICADAS	EN 12182:2012 EN 1021-1:2014 EN 1021-2:2014
FABRICANTE	Neatech.it SRL via A. de Curtis 4/A, 80040, Cercola (NA), Itália Tel. +39 081 555 1946 www.neatech.it – info@neatech.it
UTILIZAÇÃO PRETENDIDA	O produto destina-se a ser utilizado para aliviar ou compensar uma lesão ou incapacidade. Em particular, o objetivo é oferecer apoio postural à pelve do usuário.

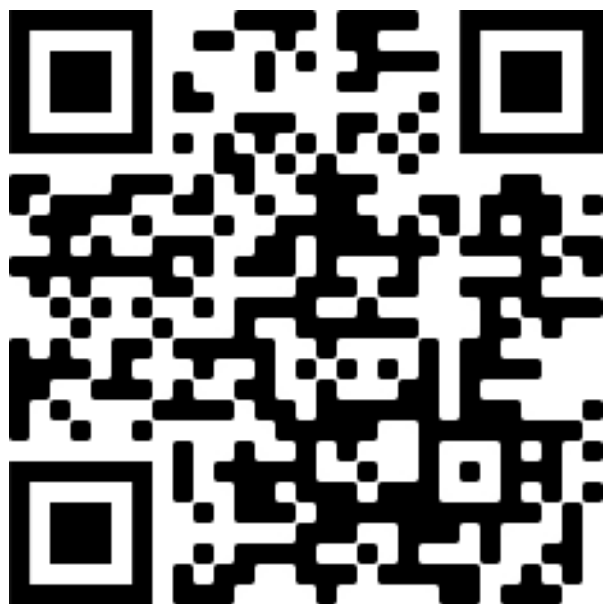

Preocupamo-nos muito com a qualidade, segurança e usabilidade dos nossos produtos. Estamos sempre a trabalhar para melhorá-los. Faça o download da versão mais recente deste manual neste link.

<https://www.neatech-download.it/s224-manual/>

Índice

1	PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	1
1.1	Desembalagem	1
1.2	Montagem na cadeira de rodas	2
2	AJUSTES.....	4
2.1	Lista de ajustes	4
2.2	Remoção e montagem do estofamento.....	5
3	MANUTENÇÃO	6
3.1	Limpeza	6
3.1.1	Limpeza da tampa.....	6
3.1.2	Limpeza das partes acolchoadas.....	6
3.1.1	Limpeza de outras peças.....	6
3.2	Transporte e armazenamento	7
3.3	Reutilização.....	7
4	ESPECIFICAÇÕES.....	8
4.1	Peso máximo do usuário.....	8
4.2	Dimensões	9
5	Garantia	10
5.1	Etiquetas.....	11
	Nota	12

Símbolos neste manual



AVISO

Este símbolo significa a presença de perigo para o usuário ou danos para o produto. Siga sempre as instruções quando este símbolo estiver presente.



INFORMAÇÃO

Este símbolo significa informação geral destinada a simplificar ou explicar melhor a utilização do produto.



INFORMAÇÕES DE CONTATO

Este símbolo significa que é necessário contatar um centro de assistência autorizado ou o fabricante.



COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES

Se ocorrer um incidente, contate o fabricante.



Para obter avisos de segurança do produto e recalls de produtos, por exemplo, garantindo que o fornecedor tenha detalhes de contato atualizados, visite o site do fabricante.



CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO

Para obter uma lista de centros de assistência autorizados, contate o fabricante.



Este produto e todos os seus componentes não podem ser tratados como resíduos domésticos. Para obter informações mais detalhadas sobre como reciclar e eliminar este produto, contate o serviço local de eliminação de resíduos.



Qualquer modificação não autorizada no produto pode aumentar o risco de ferimentos pessoais e danos ao próprio produto. Todas as modificações devem ser feitas por um centro de assistência autorizado. Não utilize acessórios ou peças sobressalentes não autorizados no produto.



Não utilize o produto em combinação com outros dispositivos médicos sem primeiro considerar os riscos decorrentes da combinação de mais produtos. Preste especial atenção à combinação de materiais resistentes ao fogo e não resistentes ao fogo.



AVISO: É proibido utilizar o produto ou as suas peças para qualquer finalidade que não seja a indicada. Para uma utilização correta, siga as instruções fornecidas neste manual. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização inadequada do produto.



As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as informações, imagens e especificações baseiam-se nos detalhes do produto disponíveis no momento da elaboração deste documento. São exemplos representativos e não pretendem ser exatamente iguais ao produto real.



TEMPERATURA

A temperatura de algumas superfícies pode aumentar quando o produto é exposto a fontes de calor externas, como a luz solar direta.



INFORMAÇÕES

Para obter informações sobre como obter informações e instruções num formato adequado para utilização por pessoas com deficiência visual, contate o fabricante.



Não instale, faça a manutenção ou opere o produto sem ler todos os avisos e este manual na íntegra.
Mantenha sempre este manual junto com o produto.



Não transporte passageiros no produto, independentemente da idade do passageiro. O produto não foi concebido para treino com pesos e não é seguro para utilização como assento durante o treino com pesos. Não desloque o seu peso ou posição sentada na direção em que está a esticar-se, pois o produto pode tombar. **Algumas patologias podem limitar a sua capacidade de utilizar o dispositivo com segurança. Consulte um médico sobre as suas limitações físicas.**



PESO MÁXIMO DO USUÁRIO

Não utilize o produto se o seu peso exceder o peso máximo do usuário indicado nas especificações deste manual do usuário.



AVISO

Não se apoie no produto. Tenha sempre cuidado ao sentar-se ou levantar-se do assento. Devem ser tomadas todas as precauções para reduzir a distância de transferência. Não deixe crianças utilizarem a cadeira de rodas sem supervisão. Não transporte passageiros no assento, independentemente da idade do passageiro. O assento não é adequado para transportar peso.



AVISO

Se ocorrer qualquer vermelhidão ou lesão na pele possivelmente relacionada com a utilização do produto, interrompa a utilização o mais rapidamente possível e contate um técnico com conhecimentos de reabilitação.



POSSÍVEIS EFEITOS NEGATIVOS

Verifique frequentemente a pele do usuário perto das zonas de contato com o produto, com o objetivo de descobrir o mais rapidamente possível a formação de escaras. Nesse caso, interrompa o uso do produto o mais rapidamente possível e contate um técnico com conhecimentos de reabilitação ou um médico.

1 PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1.1 Desembalagem

Dentro da caixa encontram-se:

- Almofada MULTIX
- Inserções de nivelamento dianteiras
- Inserções de nivelamento traseiras



ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

Para reciclar corretamente os materiais da embalagem, siga as instruções fornecidas pelo serviço local de eliminação de resíduos.



INFORMAÇÕES

Algumas das peças descritas podem não estar presentes porque estão disponíveis como acessórios e não foram adquiridas. Para mais informações, contate o fornecedor.

Antes de começar a montar o produto, verifique se todos os componentes descritos estão presentes.

Caso contrário, contate o fornecedor o mais rapidamente possível.

Não é necessária nenhuma ferramenta para a configuração do produto:

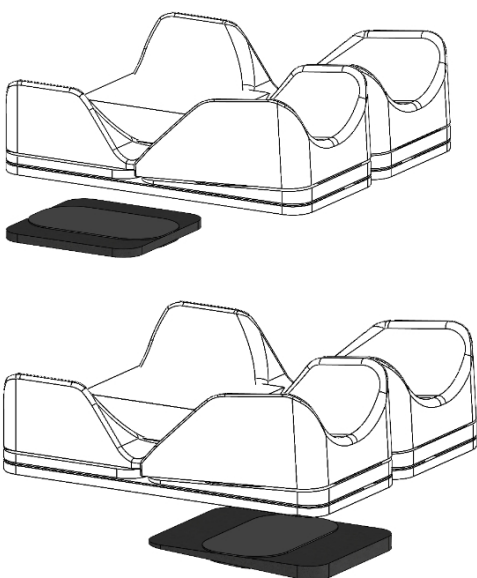


Figura 1



Tempo médio necessário:

<5 min



As inserções são fixadas com fitas adesivas.

- Remova o estofamento.
- Coloque a inserção na posição desejada.
- Volte a montar o estofamento.

1.2 Montagem na cadeira de rodas

A almofada deve ser montada numa cadeira de rodas com uma base adequada.

A base deve ser de lona ou um plano rígido.

A largura da base deve ser igual ou superior à largura da almofada a ser montada. A profundidade da base deve ser igual ou superior à profundidade da almofada a ser montada.

A base da almofada possui algumas fitas adesivas com velcro para ajudar na fixação. É necessário montar na cadeira de rodas as fitas adesivas fornecidas com velcro, colocando-as como as da almofada.

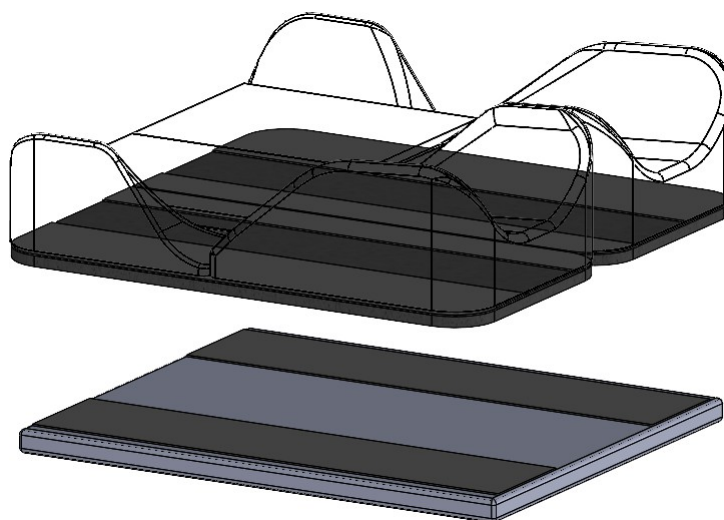


Figura 2



PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO

É muito importante realizar a primeira configuração do produto com a supervisão de um técnico com conhecimentos de reabilitação, com o objetivo de descobrir quaisquer problemas ou necessidades de ajustes e personalização relacionados com a utilização do produto.



AVISO

Siga sempre as instruções do fabricante da cadeira de rodas. Em qualquer caso:

- Aplique os freios da cadeira de rodas e certifique-se de que está bem bloqueada.
- Se a cadeira de rodas for dobrável, abra-a sempre.



AVISO

Certifique-se de colocar a almofada na cadeira de rodas na direção correta. (veja a figura, a parte da frente está à direita)

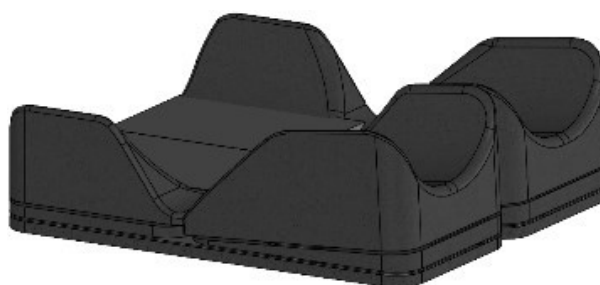


Figura 3

2 AJUSTES

2.1 Lista de ajustes

A almofada é adequada para vários usuários. Na verdade, é possível ajustar a posição das inserções para proporcionar o máximo conforto ao usuário. Os ajustes devem ser realizados por um técnico com conhecimentos de reabilitação. A seguir, apresentamos alguns ajustes recomendados.

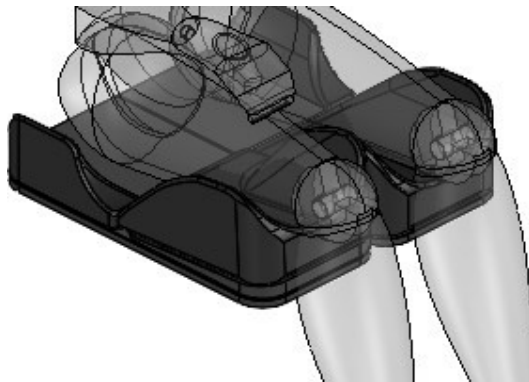


Figura 4

Tipo de operação	
A	Operação que deve ser realizada pelo usuário.
B	Operação que deve ser realizada por um assistente.
C	Operação destinada a ser realizada por um centro de assistência autorizado.



Alguns ajustes podem afetar o conforto e a saúde do usuário. Antes de realizar quaisquer ajustes, consulte sempre pessoal com competências em reabilitação.



Não realize ajustes enquanto a almofada estiver a ser utilizada.

Ajuste	Tipo de operação
Largura da área das pernas	C - Centro de assistência autorizado
Profundidade da área pélvica	C - Centro de assistência autorizado
Largura da área pélvica	C - Centro de assistência autorizado
Altura da base dianteira	C - Centro de assistência autorizado
Altura da base traseira	C - Centro de assistência autorizado

2.2 Remoção e montagem de estofamento

REMOVER ESTOFAMENTO

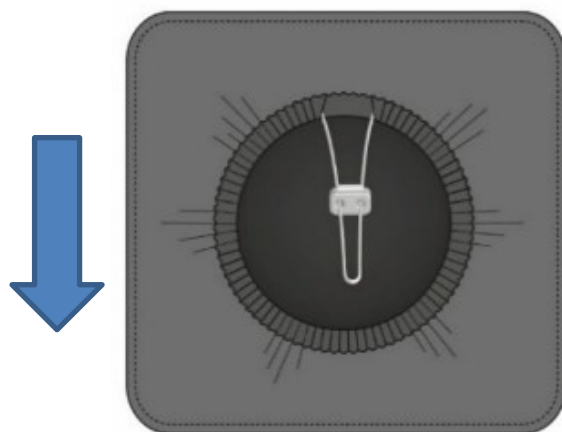


Figura 5

Para remover o estofamento, puxe o sistema de bloqueio para baixo, conforme mostrado na figura.

MONTAGEM DO ESTOFAMENTO

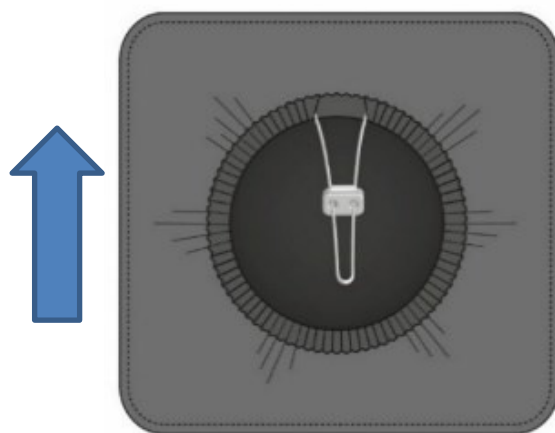


Figura 6

Para montar o estofamento, puxe o sistema de bloqueio para cima, conforme mostrado na figura.

3 MANUTENÇÃO

A manutenção regular ajuda a manter intactas a funcionalidade e a segurança do produto. Cuidados e manutenção inadequados ou insuficientes podem causar uma limitação da garantia. Evite o contato prolongado do produto com água. Evite a exposição prolongada do produto à luz solar direta.



AVISO

Qualquer intervenção no produto deve ser realizada por um centro de assistência autorizado.

3.1 Limpeza



AVISO

Para limpar o produto, não utilize dispositivos de pulverização de água a alta pressão. Não utilize removedores de manchas, solventes ou ácidos.



AVISO

O estofamento é composto por uma capa e uma parte acolchoada. Limpe as duas partes separadamente.

3.1.1 Limpeza da capa



Máquina de lavar a 60 °C



Não secar na máquina



Não torcer



Não usar lixívia



Não usar amaciante

3.1.2 Limpeza das partes acolchoadas




Máquina de lavar 30°



Não secar na máquina



Não torcer

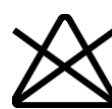

Não usar lixívia



Não usar amaciante

3.1.1 Limpeza de outras peças

É possível lavar outras partes da almofada usando um pano umedecido com detergente neutro.

3.2 Transporte e armazenamento

O produto pode ser transportado no bagageiro do veículo, mesmo sem qualquer embalagem. O produto também pode ser enviado por via aérea. Se for necessário enviar o produto, é muito importante protegê-lo com uma embalagem adequada.

Não é possível fornecer uma embalagem universal, pelo que o utilizador deve providenciá-la. A embalagem utilizada deve ser resistente à água e ao pó e suficientemente forte para proteger o produto de quaisquer danos. Ao inserir o produto na embalagem, proteja quaisquer partes salientes com espuma ou similar.

Se não pretender utilizar o produto por um longo período, mantenha-o em segurança numa área limpa e longe do calor.

3.3 Reutilização

O produto é adequado para reutilização. Antes de o dispensar, o produto deve ser limpo e submetido a manutenção. As instruções de funcionamento estão incluídas neste manual e também devem ser fornecidas quando o produto for comercializado.



AVISO

Esta operação deve ser realizada apenas num centro de assistência autorizado.

4 ESPECIFICAÇÕES

Vida útil prevista	7 anos
--------------------	--------



É possível utilizar e armazenar o produto quando a temperatura estiver dentro do intervalo especificado na tabela seguinte.

Utilização	-25 °C	+50 °C
Armazenamento	-40 °C	+65 °C

4.1 Peso máximo do usuário

Largura do assento	Peso máximo do usuário
26 cm	50 kg
30 cm	50 kg
34 cm	75 kg
36 cm	75 kg
38 cm	100 kg
42 cm	150 kg
44 cm	150 kg
46 cm	150 kg
48 cm	150 kg

4.2 Dimensões

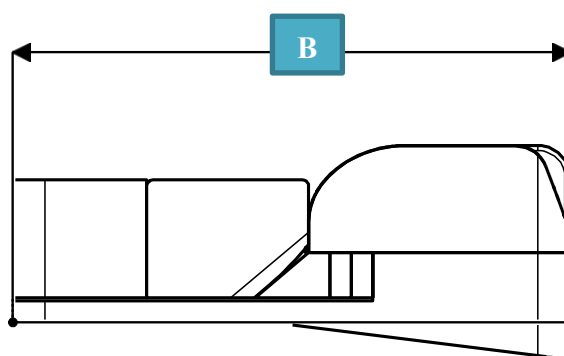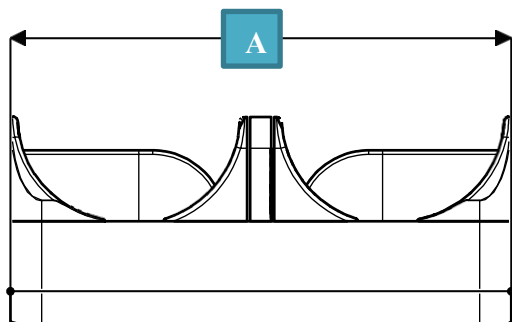

TAMANHO DA ALMOFADA	(A) LARGURA	(B) PROFUNDIDADE
X1 – 26 cm – 30 cm	26 cm	30 cm
X2 – 30 cm – 34 cm	30 cm	34 cm
X3 – 34 cm – 38 cm	34 cm	38 cm
X4 – 36 cm – 40 cm	36 cm	40 cm
X5 – 38 cm – 44 cm	38 cm	44 cm
X6 – 42 cm – 46 cm	42 cm	46 cm
X7 – 44 cm – 48 cm	44 cm	48 cm
X8 – 46 cm – 50 cm	46 cm	50 cm
X9 – 48 cm – 48 cm	48 cm	48 cm



AVISO

Os dados podem variar de acordo com a personalização específica do produto e devido a tolerância e erros de cálculo.

5 Garantia

Definições

FABRICANTE: Fabricante significa a pessoa jurídica que fabrica um produto. Para os fins do presente documento, o fabricante é:

Neatech.it s.r.l.

via Antonio de Curtis 4/A – 80040 – Cercola (NA)

Tel. +39 081 555 1946 – info@neatech.it – neatech@pec.it – www.neatech.it P.IVA

IT04812481218 – REA NA715393

CLIENTE: Cliente significa a pessoa singular ou coletiva que compra um produto do fabricante/distribuidor. Para efeitos do presente documento, o Cliente é o titular do documento fiscal emitido pelo distribuidor após o fornecimento do produto.

PRODUTO: O produto é o bem fornecido pelo fabricante ao cliente em execução de uma ordem de compra

Âmbito da garantia

O fabricante compromete-se a remediar qualquer defeito, falta de qualidade ou falta de conformidade dos produtos que lhe dizem respeito, resultantes de erros de fabricação, construção ou defeitos do material ocorridos durante o período de garantia.

Período de aplicação da garantia

O período de garantia começa na data de faturamento ao cliente. A duração do período de garantia varia de acordo com o tipo de produto.

Tipo de produto	Período de garantia [meses]
Sistemas posturais	24

Tabela 1

Quaisquer reparações ou substituições ao abrigo da garantia não alteram o período original de aplicação da garantia.

Exclusões

A garantia não cobre peças de desgaste.

Seguem-se alguns exemplos de peças sujeitas a desgaste. Rodas

Peças acolchoadas (espumas de poliuretano, viscoelásticas)

Estofamentos (incluindo lona)

Puxadores e botões

Fusíveis e lâmpadas

Escovas do motor elétrico

Filtros

A garantia limita-se aos danos relacionados com o produto e não pode, em circunstância alguma, cobrir danos causados a terceiros como resultado de uma falha do produto.

A garantia não cobre peças danificadas por sobrecarga, uso inadequado, alterações e reparações feitas por terceiros não autorizados. A garantia não é válida em caso de adulteração, armazenamento incorreto, manutenção incorreta ou não autorizada.

5.1 Etiquetas

Dentro de cada almofada há uma etiqueta com informações sobre:

- Fabricante e endereço
- Número da peça
- Número de série
- Ano de fabricação
- Peso máximo do usuário

Para qualquer pedido relacionado com a garantia ou, em geral, com o produto, certifique-se de ter as informações disponíveis nesta etiqueta.

Nota

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Importado e distribuído por: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA REABILITAÇÃO LTDA. CNPJ 58.895.681/0001-83. Rua Ernesto Bristotti Nº 41 - Jardim Myriam - Campinas/SP. CEP: 13.098-408. AFE ANVISA nº 8.11.374-2. Resp. Técnico: Lidyane Santos do Nascimento CREFITO/SP 169.759-F. Registro ANVISA nº 81137420027. Serviço de atendimento do consumido SAC: (19) 3304-2500 / sac@maismovimento.com.br.

versão 2 deste manual do usuário.



BUDDY BRACE

BUDDY BRACE

website: www.buddybrace.com

e-mail: info@buddybrace.com