

ADVERTÊNCIA

- Certifique-se de cumprir com a orientação de uso do produto.
- Durante a aplicação é necessário uma angulação de 90 graus entre o dispositivo injetor e a pele.
- Se a angulação de 90 graus entre o dispositivo injetor e a pele não for respeitada, existe a possibilidade de dano ao paciente e o ativo injetado pode não ter a eficácia desejada.
- Certifique-se de conectar a ampola sobre o dispositivo injetor antes do uso. Disparar o dispositivo de injeção sem conectar a ampola pode causar danos ao equipamento.
- Descartar e não usar (ampola, adaptador e caps) fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados.
- A SMART PRESS GR deve ser usada somente com componentes fornecidos pelo mesmo fabricante, a fim de assegurar eficácia do resultado desejado.
- O carregamento inadequado do dispositivo injetor pode causar danos ao equipamento.
- Não utilizar ativos e produtos com densidades em gel ou creme. Utilizar somente ativos e produtos com densidade aquosa.

PRECAUÇÕES

- Não armazenar os produtos em condições extremas de temperatura e umidade;
- Evite exposição direta à luz.
- Não utilizar para coleta de sangue.
- Não tóxica, não pirogênica e livre de látex;
- Evitar quedas e impactos excessivos no sistema de injeção.
- Quedas e impactos podem danificar o produto.
- Certifique-se de manter o equipamento fora do alcance de crianças.

GARANTIA


SE, DENTRO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA, ESTE PRODUTO APRESENTAR FALHAS OU DEFEITOS NO MATERIAL OU DE UTILIZAÇÃO, OS REPAROS OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, OU DOS COMPONENTES, SERÃO REALIZADOS SEM QUALQUER TIPO DE COBRANÇA.

A GARANTIA EXCLUI

- a) Danos causados por acidentes, utilização e transporte indevidos.
- b) Unidades submetidas a reparos em locais não autorizados.
- c) Unidades não utilizadas de acordo com as instruções de uso.
- d) Danos que excedam o custo do produto.
- e) Deterioração do produto resultante de armazenamento inadequado.
- f) Casos em que o cliente não apresente prova da realização da compra do produto – Nota Fiscal.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A SMART PRESS GR possibilita a aplicação de líquidos injetáveis através da pele, no tecido subcutâneo, por meio de alta pressão, com a utilização de ampola de 0,3 ml ou 0,5 ml. A SMART PRESS GR não possui agulha ou qualquer tipo de material perfurante, a aplicação é realizada através da pressão exercida pelo equipamento. A mesoterapia realizada com a SMART PRESS GR é indicada para tratamentos faciais, capilares e corporais com preguçamento menor que 1,5cm

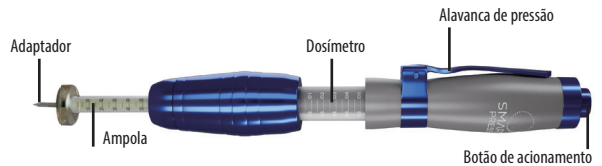

1. Mola e pistão, cuja pressão por meio de alavanca, injeta rápida e uniformemente o ativo sob a pele através de um orifício com um diâmetro de 0,17 mm. A SMART PRESS GR possui pressão fixa.
2. Com a ajuda da energia do pistão mecânico no aparelho, permite, sob pressão, rápida mas suavemente empurrar o ativo através de um orifício microscópico para o tecido subcutâneo.
3. Os ativos são absorvidos muito melhor e mais rapidamente do que com a introdução de uma agulha, o que foi confirmado em uma série de estudos e testes realizados.

Ampola de 0,3ml - consegue injetar até 0,05ml por disparo



Ampola de 0,5ml - consegue injetar até 0,15ml por disparo




4. A SMART PRESS GR é a solução ideal para aqueles pacientes com fobia de agulhas

CARACTERÍSTICAS

1. **Livre de Agulha** - Muitas pessoas sofrem com fobia de agulhas, e a nossa tecnologia livre de agulhas auxilia no tratamento dessas pessoas;
2. **Praticamente sem dor** - Injeção rápida em menos de 1/3 de segundo, micro orifício, e injeções automáticas pela pressão da mola sendo praticamente indolor.

3. **Rápido, fácil e seguro** - A SMART PRESS GR é simples e fácil de manusear, porém o equipamento requer uma formação e capacitação profissional prévia, referente a técnica utilizada.
4. **Sem risco de ferimentos por picada de agulha** - Elimina lesões por picada de agulha, pois a caneta não tem agulhas, reduzindo os custos de descarte e eliminando o risco de contaminação cruzada.
5. **Ampola e adaptador são esterilizados por óxido de etileno** - Esses itens são descartáveis, eliminando assim a possibilidade de contaminação cruzada
6. **Longa vida e baixa manutenção**

rev.: 00

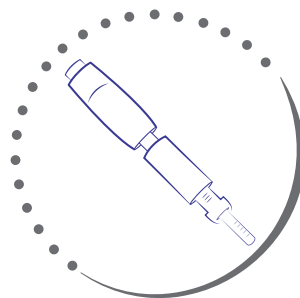

SMART PRESS

MANUAL

GUIA DE OPERAÇÃO


I - Conectar a ampola no adaptador



II - Extrair o ativo do frasco original



III - Selecionar a dose extraída ajustando o dosímetro

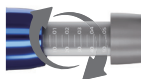


IV - Conectar a ampola na SMART PRESS GR



V - Puxar a alavanca até o final para adquirir pressão



VI - Selecionar a dose desejada ajustando o dosímetro

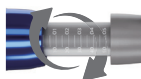

VII - Pressionar o botão de acionamento.



SOBRE O PRODUTO

1. SMART PRESS GR: produto não invasivo, utilizado pelo método de pressurização;
2. Efeitos: é necessário uma anamnese adequada para o uso da técnica e equipamento
3. Equipamento de uso profissional.
4. A escolha do ativo a ser utilizado fica a critério do profissional, de acordo com a anamnese realizada.

SMART PRESS GR

Fabricado por: GR MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Nome Técnico: Caneta para Injeção de Medicamento

Anvisa: 81382050019

Descrição: SMART PRESS GR - I

REF: SPGR-01

AVISO LEGAL

POR FAVOR, NÃO UTILIZE A SMART PRESS GR SEM ANTES OBTIVER O TREINAMENTO ADEQUADO.

ATENÇÃO: Ler atentamente as instruções de uso do produto antes da utilização. Todas as advertências e precauções mencionadas devem ser rigorosamente seguidas.

A GR MED não se responsabiliza caso o profissional opte por não seguir as observações mencionadas neste manual.



UM PRODUTO
SMART GR



smartgrbr



smartgr.com.br