

SMART PRESS

MANUAL

SMART PRESS XS

Fabricado por: HEBEI LECH TECHNOLOGY CO., LTD - China

Nome Técnico: Caneta para Injeção de Medicamento

Registro Anvisa: 81382050020

Descrição: SMART PRESS XS-I

REF: GXS-1

AVISO LEGAL

POR FAVOR, NÃO UTILIZE A SMART PRESS XS SEM ANTES OBTIVER O TREINAMENTO ADEQUADO.



ADVERTÊNCIA

- Certifique-se de cumprir com a orientação de uso do produto.
- Durante a aplicação é necessário uma angulação de 90 graus entre o dispositivo injetor e a pele.
- Se a angulação de 90 graus entre o dispositivo injetor e a pele não for respeitada, existe a possibilidade de dano ao paciente e o ativo injetado pode não ter a eficácia desejada.
- Certifique-se de conectar a ampola sobre o dispositivo injetor antes do uso. Disparar o dispositivo de injeção sem conectar a ampola pode causar danos ao equipamento.
- Descartar e não usar (ampola, adaptador e caps) fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados.
- A SMART PRESS XS deve ser usado somente com componentes fornecidos pelo mesmo fabricante, a fim de assegurar eficácia do resultado desejado.
- O carregamento inapropriado do dispositivo injetor pode causar danos ao equipamento.

PRECAUÇÕES

- Não armazenar os produtos em condições extremas de temperatura e umidade;
- Evite exposição direta à luz.
- Não utilizar para coleta de sangue.
- Não tóxica, não pirogênica e livre de látex;
- Evitar quedas e impactos excessivos no sistema de injeção.
- Quedas e impactos podem danificar o produto.
- Certifique-se de manter o equipamento fora do alcance de crianças.

GARANTIA

SE, DENTRO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA, ESTE PRODUTO APRESENTAR FALHAS OU DEFEITOS NO MATERIAL OU DE UTILIZAÇÃO, OS REPAROS OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, OU DOS COMPONENTES, SERÃO REALIZADOS SEM QUALQUER TIPO DE COBRANÇA.

A GARANTIA EXCLUI

- Danos causados por acidentes, utilização e transporte indevidos.
- Unidades submetidas a reparos em locais não autorizados.
- Unidades não utilizadas de acordo com as instruções de uso.
- Danos que excedam o custo do produto.
- Deterioração do produto resultante de armazenamento inadequado.
- Casos em que o cliente não apresente prova da realização da compra do produto – Nota Fiscal.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A SMART PRESS XS possibilita a aplicação de líquidos injetáveis através da pele, no tecido subcutâneo, por meio de alta pressão, com a utilização de uma ampola de 0,5 ml. A SMART PRESS XS não possui agulha ou qualquer tipo de material perfurante, a aplicação é realizada através da pressão exercida pelo equipamento. A mesoterapia realizada com a SMART PRESS XS é indicada para tratamentos faciais, corporais e capilares.




1. Mola e pistão, cuja pressão rotativa, injeta rápida e uniformemente o ativo sob a pele através de um orifício com um diâmetro de 0,17 mm. A SMART PRESS XS possui 3 níveis de pressurização.
2. Com a ajuda da energia do pistão mecânico no aparelho, permite, sob pressão, rápida mas suavemente empurrar o ativo através de um orifício microscópico para o tecido subcutâneo.

1-2-3 (do fraco para o forte)



3. Os ativos são absorvidos muito melhor e mais rapidamente do que com a introdução de uma agulha, o que foi confirmado em uma série de estudos e testes realizados.

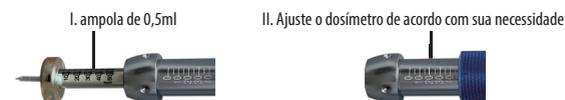

- Pressão 1** - consegue injetar até 0,1ml por disparo
Pressão 2 - consegue injetar até 0,25 por disparo
Pressão 3 - consegue injetar até 0,4ml por disparo

4. A SMART PRESS XS é a solução ideal para aqueles pacientes com fobia de agulhas

CARACTERÍSTICAS

1. **Livre de Agulha** - Muitas pessoas sofrem com fobia de agulhas, e a nossa tecnologia livre de agulhas auxilia no tratamento dessas pessoas;

2. **Praticamente sem dor** - Injeção rápida em menos de 1/3 de segundo, micro orifício, e injeções automáticas pela pressão da mola sendo praticamente indolor.


3. **Rápido, fácil e seguro** - A SMART PRESS XS é simples e fácil de manusear, porém o equipamento requer uma formação e capacitação profissional prévia, referente a técnica utilizada.

4. **Sem risco de ferimentos por picada de agulha** - Elimina lesões por picada de agulha, pois a caneta não tem agulhas, reduzindo os custos de descarte e eliminando o risco de contaminação cruzada.

5. **Ampola e adaptador são esterilizados por óxido de etileno** - Esses itens são descartáveis, eliminando assim a possibilidade de contaminação cruzada

6. **Longa vida e baixa manutenção**

GUIA DE OPERAÇÃO

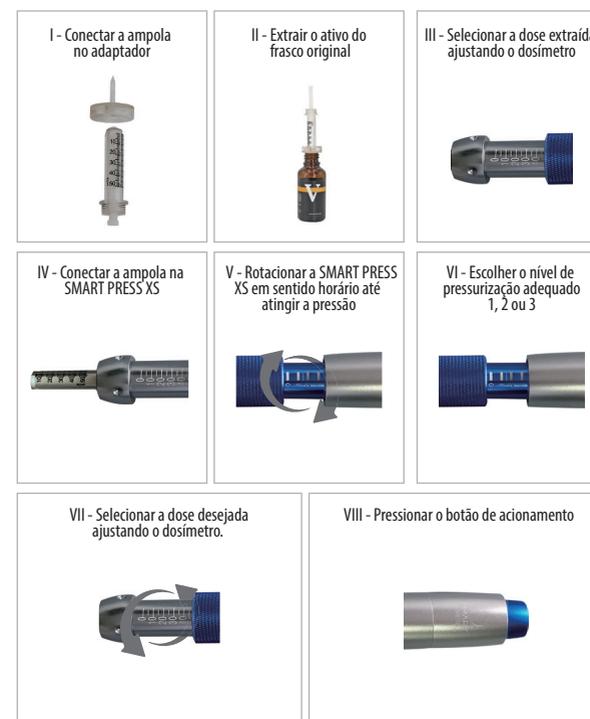

SOBRE O PRODUTO

1. SMART PRESS XS: produto não invasivo, utilizado pelo método de pressurização;
2. Não utilizar ativos e produtos com densidades em gel ou creme. Utilizar somente ativos e produtos com densidade aquosa.
3. Efeitos: é necessário uma anamnese adequada para o uso da técnica e equipamento
4. Equipamento de uso profissional.