
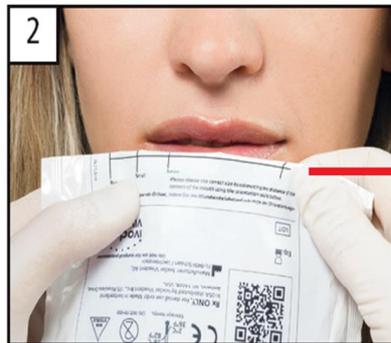


OptraGate

Com as novas embalagens, ficou ainda mais fácil selecionar o tamanho correto do OptraGate.

Fácil seleção do tamanho

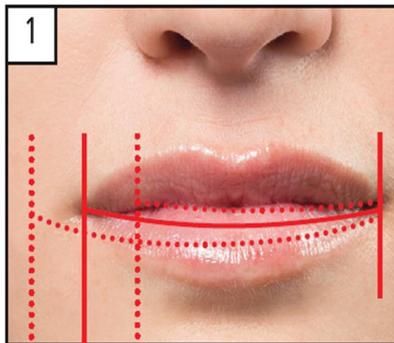

J Distância entre as comissuras labiais de aprox. 4,5 cm → Tamanho **JUNIOR**


S Distância entre as comissuras labiais de aprox. 6 cm → Tamanho **SMALL**

R Distância entre as comissuras labiais de aprox. 7 cm → Tamanho **REGULAR**

1. Determinar a distância entre as duas comissuras labiais, seguindo a curvatura dos lábios.

2. Utilizar como referência as guias de marcação da embalagem.

3. Selecionar o tamanho correto com base nas marcações.

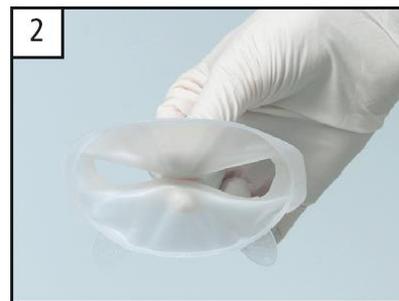


Fácil manipulação

1. – 3. Segure o anel intraoral (o mais grosso) com a mão não dominante e comprima-o para que o anel fique em formato de 8. Em seguida, mude para o polegar e indicador da sua mão dominante. Certifique-se de manter o anel pressionado em conjunto.

Fácil colocação

4. Colocar o OptraGate é mais fácil quando a boca do paciente está relaxada.

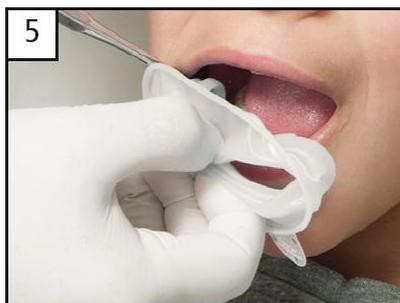


5. Posicionar o OptraGate no canto direito da boca.



6. Posicionar o OptraGate no canto esquerdo da boca.



7. Posicionar o OptraGate na região vestibular inferior.

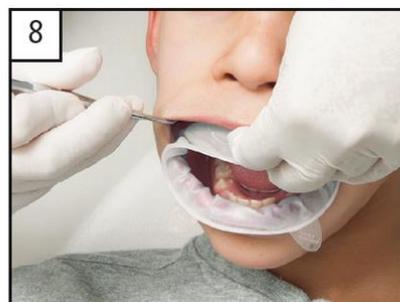

8. Posicionar o OptraGate na região vestibular superior.



9. OptraGate colocado na posição correta

Fácil remoção

10. – 12. Remova o OptraGate primeiro da parte superior e depois da região inferior, utilizando uma toalha de papel.