

Restaurações diretas em dentes posteriores de forma prática e eficaz

AUTOR: Prof^º. Dr^º. Dayse Lúcia Otero Amaral

Paciente do sexo feminino, 29 anos

A QUEIXA

Sintomatologia dolorosa estimulada por frio na região inferior esquerda.



O EXAME CLÍNICO/RADIOGRÁFICO

Dente 36 apresentava restauração com infiltração marginal, além de deficiência de cor e forma.


O TRATAMENTO

Foi realizada a troca da restauração substituindo-a pela resina composta de baixa tensão de contração Opus Bulk Fill de fácil aplicação. O dente 36 foi restaurado em dois passos, porém com a mesma resina. Inicialmente, fechou-se a cavidade proximal, e na sequência fez-se o preenchimento oclusal. O dente 37 apresentava cavidade CL I, e foi restaurado em passo único.

PASSO A PASSO:



1. Caso inicial

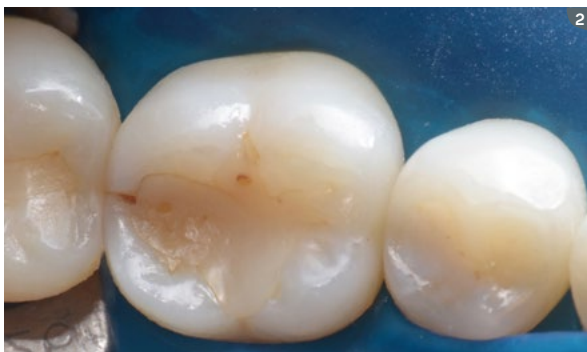

2. Dentes isolados



3



4



5

3. Cavidades prontas.
4. Condicionamento ácido de esmalte.
5. Condicionamento ácido de dentina.

COMPROVADO POR PESQUISADORES. APROVADO PELOS DENTISTAS.

Um dos adesivos mais vendidos do país.



Garante a alta longevidade do filme adesivo e a qualidade da polimerização mesmo em ambientes com alta umidade



Fórmula com nanotecnologia



Completo pacote de atributos por um menor preço



Baixo índice de sensibilidade pós-operatório



Comprovado potencial superior de adesão

Descubra mais diferenciais do
Ambar em fgm.ind.br



Você merece.



6. Aplicação do adesivo.
7. Fotopolimerização do adesivo.
8. Reconstrução da parede proximal.
9. Parede proximal restaurada.

// A resina Opus Bulk Fill da FGM atende a qualquer clínica que utilize restaurações diretas em resina, permitindo protocolos de confecção práticos, rápidos e seguros. É a modernidade chegando nas áreas posteriores. //

Prof^a. Dr^a. Dayse Amaral //



10. Visão da primeira restauração finalizada e segunda a finalizar.
11. Primeira restauração finalizada.
12. Restaurações finalizadas com isolamento.
13. Caso finalizado.

MATERIAIS FGM UTILIZADOS

RESINA COMPOSTA DE BAIXA
TENSÃO DE CONTRAÇÃO
Opus Bulk Fill

MICROAPLICADOR
DESCARTÁVEL
Cavibrush Regular

ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL
DE 5ª GERAÇÃO
Ambar

CONDICIONADOR ÁCIDO
FOSFÓRICO A 37%
Condac 37

