


Restauração direta em dente posterior pela técnica simplificada “bulk filling”

AUTOR: Prof. Dr. Eduardo Vargas

Paciente do sexo feminino, 53 anos.

A QUEIXA

Dente 46 com necessidade de restauração definitiva.

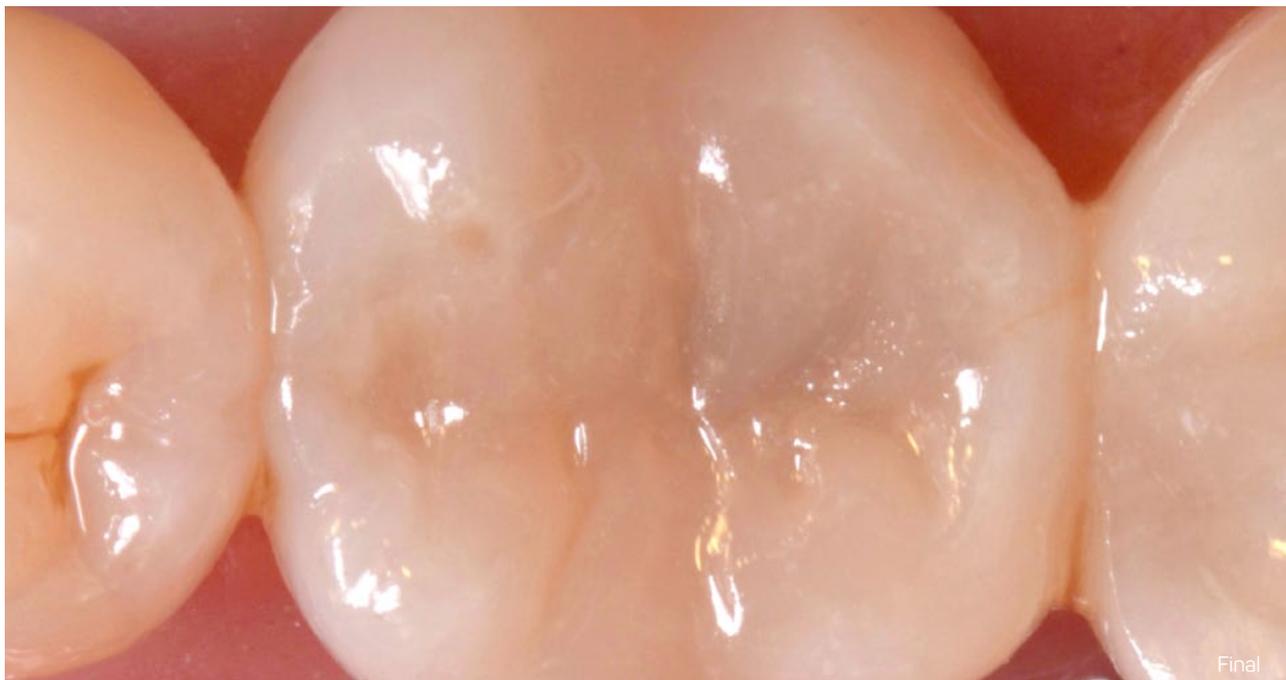

O EXAME CLÍNICO/RADIOGRÁFICO

Dente 46 apresentando ampla lesão ocluso-vestibular com restauração provisória que deveria ser removida para a confecção da restauração definitiva. O dente apresentava-se vital e sem sintomatologia dolorosa.

O TRATAMENTO

Após a remoção do curativo, foi utilizada a resina Opus Bulk Fill (FGM), a qual permite que, com apenas um incremento, uma cavidade inteira possa ser restaurada de forma única, obtendo a estética e função desejada pela paciente.

PASSO A PASSO:




1. Caso inicial.
2. Dente isolado.

// A odontologia contemporânea exige cada vez mais praticidade e rapidez. A resina Opus Bulk Fill veio para completar o mercado das restaurações diretas, em que função e estética são atendidas com todos os critérios esperados em uma resina.

Prof. Dr. Eduardo Vargas //



3. Limpeza da cavidade.
4. Alisamento do ângulo cavossuperficial.
5. Medição da profundidade da cavidade.
6. Condicionamento ácido de esmalte.

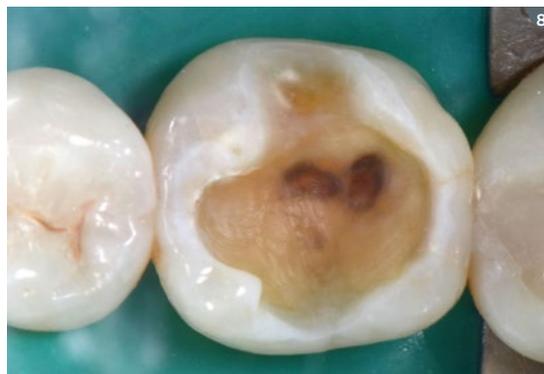

7. Condicionamento ácido de dentina.
8. Cavidade após remoção do ácido.
9 e 10. Aplicação do adesivo.



11. Fotopolimerização do adesivo.
12. Confeção da parede vestibular.



13. Preenchimento da cavidade oclusal.
14. Escultura da face oclusal.



15. Restauração finalizada imediatamente após a confecção.
16. Restauração finalizada 1 semana após a confecção.

MATERIAIS FGM UTILIZADOS

RESINA COMPOSTA DE BAIXA
TENSÃO DE CONTRAÇÃO
Opus Bulk Fill

MICROAPLICADOR
DESCARTÁVEL
Cavibrush Regular

ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL
DE 5ª GERAÇÃO
Ambar

CONDICIONADOR ÁCIDO
FOSFÓRICO A 37%
Condac 37

