



Máscara Descartável Polar Protect

Tripla Camada em TNT com elástico - **Não Estéril**

Indicação de uso

As máscaras devem ser usadas para proteção de vias aéreas, prevenindo problemas pulmonares contra: poluição, poeira, partículas e gotículas, sendo bloqueadas pela tripla camada em TNT.

Na cor branca, impermeável e não inflamável, as máscaras de proteção possuem tiras de elástico e costuras em overlok, para garantir a fixação correta e impedir que gotículas sejam absorvidas pela área descoberta do rosto.

Instrução de Uso

Retire a máscara da embalagem, pegue a mesma pelas alças (elásticos), posicione no centro da boca, coloque os elásticos atrás das orelhas e molde ao seu nariz.

Observação: A dobra da máscara ficará para fora.

Advertências / Preocupações

A validade é garantida enquanto a embalagem permanecer integra. Evite o risco de contaminação, após o uso, descarte-as. Armazenar em local seco em temperatura ambiente.

Material Tecido não Tecido (TNT)

Tripla Camada (25g/m² | 33g/m² | 25g/m²)

80% poliéster e 20% viscose

Aplicação de Bactericida

Hidrorepelente

Não Estéril

Tamanho ÚNICO

