

*Dedicados ao seu bem estar!*

# MANUAL DO USUÁRIO

## *Banco Giratório*



Foto meramente ilustrativa



Sob condições expressas  
no presente Manual.

**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.**

METALIC MEDICAL Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Nova Esperança, 1004 – Emiliano Pernetá – Pinhais / PR – 83324-400

Tel.: (41) 3033-2016

Site: [www.metalicmedical.com.br](http://www.metalicmedical.com.br) – Email: [qualidade@metalicmedical.com.br](mailto:qualidade@metalicmedical.com.br)

# 1. APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Metalic Medical.

## Política da Qualidade

“Produzir soluções em Móveis Hospitalares, atendendo as necessidades e superando a expectativa de nossos clientes. Trabalhar continuamente no aprimoramento e capacitação contínua de nossa equipe, buscando construir uma marca de excelência reconhecida por todos os seus públicos atendendo sempre os padrões exigidos.”



- Ao receber o produto, verifique suas condições. Caso haja algum problema comunique imediatamente ao transportador ou ao fabricante;
- No decorrer do uso do produto, caso apresente algum defeito nos movimentos citados neste manual, favor contatar o serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**, caso contrário o mesmo poderá apresentar risco ao usuário;
- Caso tenha dificuldade de compreender as informações contidas neste manual, entrar em contato com serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**;
- Produtos de uso hospitalar possuem uma vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio;
- É importante usa-los da melhor maneira possível, respeitando seus limites e realizando as manutenções preventivas corretamente.

## 2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E UTILIZAÇÃO

As Mesas Ginecológicas são indicadas para acomodar o paciente durante exames médicos em geral, podendo ser utilizado em ambiente clínico-hospitalar.

## 3. MODELOS ABRANGIDOS POR ESSE MANUAL

MT119	BANCO GIRATÓRIO INOX ASSENTO ESTOFADO COM RODAS
MT120	BANCO GIRATÓRIO INOX ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS
MT121	BANCO GIRATÓRIO INOX ASSENTO INOX COM RODAS
MT122	BANCO GIRATÓRIO INOX ASSENTO INOX SEM RODAS
MT123	BANCO GIRATÓRIO PINTADO ASSENTO ESTOFADO COM RODAS
MT124	BANCO GIRATÓRIO PINTADO ASSENTO ESTOFADO SEM RODAS
MT125	BANCO GIRATÓRIO PINTADO ASSENTO INOX COM RODAS
MT126	BANCO GIRATÓRIO PINTADO ASSENTO INOX SEM RODAS

**PRODUTO ISENTO DE  
REGISTRO JUNTAMENTE A  
ANVISA**

## 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Modelos		MT119	MT120	MT121	MT122	MT123	MT124	MT125	MT126
Estrutura	Aço Carbono					x	x	x	x
	Aço Inoxidável	x	x	x	x				
Assento	Estofado em espuma revestido em corvim	x	x			x	x		
	Aço Inoxidável			x	x			x	x
Rodízio	Com Rodízio	x		x		x		x	
	Sem Rodízio		x		x		x		x
Dimensões		0,32 x	0,32 x	0,32 x	0,32 x	0,32 x	0,32 x	0,32 x	0,32 x
		0,55 x	0,50 x	0,55 x	0,50 x	0,55 x	0,50 x	0,55 x	0,50 x
		0,32 (LxAxP)	0,32 (LxAxP)	0,32 (LxAxP)	0,32 (LxAxP)	0,32 (LxAxP)	0,32 (LxAxP)	0,32 (LxAxP)	0,32 (LxAxP)
Peso do Produto	4,4Kg	4,4Kg	4,8Kg	4,8Kg	4,8Kg	4,8Kg	4,2Kg	4,2Kg	
Peso Máximo Suportado	90Kg	90Kg	90Kg	90Kg	90Kg	90Kg	90Kg	90Kg	



**Capacidade Máxima de Peso 90Kg**

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

## 5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

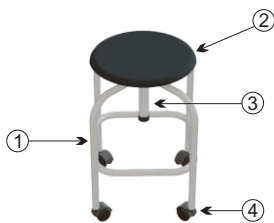

### LEGENDA

- 1 - Estrutura Aço Carbono/Aço Inoxidável;
- 2 - Assento Estofado/Aço Inoxidável;
- 3 - Rosca de Regulação de altura;
- 4 - Rodízio.

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

## 6. INSTRUÇÕES DE USO



### AVISO

**Respeite a capacidade máxima de peso do produto!**


Para uso do banco giratório, verifique se a rosca está devidamente encaixada em sua base e rosqueada. Conforme seta indicativa na imagem ao lado.

No caso de utilização do banco com o assento em seu nível mais elevado, tenha cuidado para não desequilibrar e cair. O mesmo pode sofrer instabilidade neste caso.



### AVISO

**Não utilize abrasivos e solventes para limpeza dos produtos!**  
**Consulte neste manual, orientação no Item Limpeza e Desinfecção.**

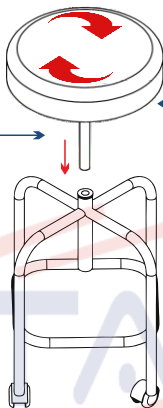

↑ **ESQUERDA**

↓ **DIREITA**

Você pode ajustar a altura do banco conforme necessidade. Para elevar gire o assento para esquerda e para abaixar, gire o mesmo para direita.



### AVISO

**Em bancos com rodízios, verifique se o piso está nivelado antes do uso. NÃO UTILIZE EM PISOS IRREGULARES!**

**Na ausência de um dos rodízios ou ponteiros, não utilize o produto. O mesmo pode gerar instabilidade durante o uso!**

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

## 7. MANUTENÇÃO

- Toda manutenção deverá ser feita por pessoa capacitada e habilitada, utilizando ferramentas e materiais adequados para cada situação, caso contrário, ferimentos ou danos podem ocorrer;
- Para melhor conservação do produto, aconselha-se reaperto de parafusos e conexões a cada 6 (seis) meses de uso;
- O uso ou substituição de qualquer item, acessório, ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário;
- Para manutenção corretiva o fabricante dispõe de assistência técnica que poderá efetuar troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e/ou opcionais que apresentem quebra e/ou desgaste natural pelo uso, mediante solicitação do comprador;
- No caso de algum problema entrar em contato com:

### ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL

Rua Nova Esperança, 1004. Emiliano Pernetá  
CEP: 83324-400 - Pinhais - PR - BRASIL  
Tel: (41) 3033-2016  
E-mail: [qualidade@metalicmedical.com.br](mailto:qualidade@metalicmedical.com.br)



## 8. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Nunca use produtos de limpeza a base de cloro nem palha de aço na limpeza de produtos hospitalares **METALIC MEDICAL**;
- Sempre antes ou após a utilização dos produtos hospitalares da **METALIC MEDICAL**, o operador deverá realizar a limpeza do produto utilizando um pano limpo, levemente umedecido com água ou álcool 70%, retirando o excesso com um pano limpo e seco.
- Não utilizar qualquer tipo de abrasivo, pois os resíduos do mesmo comprometem a resistência à corrosão.
- Não utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura, o aço inox ou os estofados.



**Nunca utilize produtos a base de cloro!**

## 9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Não expor diretamente ao sol, nem a umidade. Armazenar em local limpo e seco.

## 10. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Evitar movimentos bruscos ou queda;
- Em caso de mau funcionamento, entrar em contato imediatamente com o fabricante;
- Durante a limpeza, não utilizar qualquer tipo de abrasivo ou solvente para não danificar a pintura/inox e outras superfícies sensíveis a esse tipo de produto;
- Respeite o limite de capacidade de peso do produto;
- Verifique periodicamente a estabilidade e funcionamento do produto. Caso encontre peças soltas ou o produto não esteja funcionando corretamente, entre em contato com **ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIC MEDICAL**.
- Verifique o nivelamento do móvel com o piso. Não utilizar o produto em pisos irregulares, pois o produto perderá sua estabilidade.

## 11. GARANTIA

A garantia dos componentes em condições normais de uso é de um ano, já incluso os 90 dias legais. Caso venha ocorrer problemas o fabricante reserva o direito de submeter a parte danificada a análise, para identificar as causas do dano ou defeito. Caso detectado que o problema ocorre por mau uso, ou falta dos cuidados necessários, conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

Para que seu produto seja atendido em garantia, a etiqueta de informações do produto com o número de série deverá obrigatoriamente estar fixada ao mesmo. **Por isso, não retire a etiqueta!**



	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. CNPJ: 05.788.117/0001-03 Rua Nova esperança, 1004 - CEP: 83.324-400 Pinhais/PR - Brasil
MT123 Banco giratório pintado assento estof c/ rodas	
NS: 2678/11	
Resp. Técnica: Rhaissa S. T. Stokloski Crefito: 168286-F	Tel: 41 3033 2016 www.metalicmedical.com.br metalicmedical@metalicmedical.com.br



**' O fabricante se reserva o direito de alterar este manual sempre que se fizer necessário'**

Responsável Técnica  
Rhaissa S. Torno  
CREFITO 126286 - F