

Dedicados ao seu bem estar!

MANUAL DO USUÁRIO

Cadeira de Coleta



Foto meramente ilustrativa



Sob condições expressas
no presente Manual.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

METALIC MEDICAL Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá - Pinhais / PR - 83324-400

Tel.: (41) 3033-2016

Site: www.metalicmedical.com.br - Email: qualidade@metalicmedical.com.br

1. APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Metalic Medical.

Política da Qualidade

"Produzir soluções em Móveis Hospitalares, atendendo as necessidades e superando a expectativa de nossos clientes. Trabalhar continuamente no aprimoramento e capacitação contínua de nossa equipe, buscando construir uma marca de excelência reconhecida por todos os seus públicos atendendo sempre os padrões exigidos."



AVISO

- Ao receber o produto, verifique suas condições. Caso haja algum problema comunique imediatamente ao transportador ou ao fabricante;
- No decorrer do uso do produto, caso apresente algum defeito nos movimentos citados neste manual, favor contatar o serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**, caso contrário o mesmo poderá apresentar risco ao usuário;
- Caso tenha dificuldade de compreender as informações contidas neste manual, entrar em contato com serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**;
- Produtos de uso hospitalar possuem uma vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio;
- É importante usa-los da melhor maneira possível, respeitando seus limites e realizando as manutenções preventivas corretamente.

2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E UTILIZAÇÃO

O produto é indicado para acomodação e repouso do paciente em ambiente hospitalar e ambulatorial.

3. MODELOS ABRANGIDOS POR ESSE MANUAL

Modelo	Descrição	Classe de Risco
MT170	Cadeira para coleta assento estofado	Classe de Risco I
MT171	Cadeira para coleta assento plástico	Classe de Risco I

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	MT170	MT171
Estrutura	Aço Carbono	x
Assento	Estofado em espuma revestido em corvim	x
	Plástico	x
Dimensões	0,83 x 0,63 x 0,55 (AxLxC)	0,83 x 0,63 x 0,55 (AxLxC)
Peso do Produto	11,8Kg	7,5Kg
Peso Máximo Suportado ? Assento	120Kg	120Kg
Peso Máximo Suportado - Apoio de Braço	9Kg	9Kg

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS



LEGENDA

- 1 - Encosto;
- 2 - Apoio de MMSS** para Coleta;
- 3 - Assento Estofado/Plástico;
- 4 - Manipulo para Regulagem de altura.

**MMSS - Membros Superiores

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.



Capacidade Máxima de Peso 90Kg

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

6. INSTRUÇÕES DE USO



AVISO

Respeite a capacidade máxima de peso do produto!

Para regulagem da altura do apoio de braço utilize o manípulo nas laterais da cadeira, conforme necessidade. Siga seta indicativa na imagem ao lado.

Antes de usa-la, verifique se o manípulo está devidamente apertado em suas laterais.



AVISO

Não utilize abrasivos e solventes para limpeza dos produtos!

Consulte neste manual, orientação no Item Limpeza e Desinfecção.



Para usa-la basta levantar o apoio de braços frontal para esquerda, sentar e abaixar o apoio retornando a posição inicial.

Não utilize o apoio de braços para outra finalidade, que não o apoio dos MMSS** para coleta.



AVISO

Verifique se o piso está nivelado antes do uso. NÃO UTILIZE EM PISOS IRREGULARES!

Na ausência de uma das ponteiros, não utilize o produto. O mesmo pode gerar instabilidade durante o uso!

MMSS** - Membros Superiores
Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

7. MANUTENÇÃO

- Toda manutenção deverá ser feita por pessoa capacitada e habilitada, utilizando ferramentas e materiais adequados para cada situação, caso contrário, ferimentos ou danos podem ocorrer;
- Para melhor conservação do produto, aconselha-se reaperto de parafusos e conexões a cada 6 (seis) meses de uso;
- O uso ou substituição de qualquer item, acessório, ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário;
- Para manutenção corretiva o fabricante dispõe de assistência técnica que poderá efetuar troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e/ou opcionais que apresentem quebra e/ou desgaste natural pelo uso, mediante solicitação do comprador;
- No caso de algum problema entrar em contato com:

ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL

Rua Nova Esperança, 1004. Emiliano Pernetá

CEP: 83324-400 - Pinhais - PR - BRASIL

Tel: (41) 3035-2016

E-mail: qualidade@metalicmedical.com.br

8. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Nunca use produtos de limpeza a base de cloro nem palha de aço na limpeza de produtos hospitalares **METALIC MEDICAL**;
- Sempre antes ou após a utilização dos produtos hospitalares da **METALIC MEDICAL**, o operador deverá realizar a limpeza do produto utilizando um pano limpo, levemente umedecido com água ou álcool 70%, retirando o excesso com um pano limpo e seco.
- Não utilizar qualquer tipo de abrasivo, pois os resíduos do mesmo comprometem a resistência à corrosão.
- Não utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura, o aço inox ou os estofados.

9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Não expor diretamente ao sol, nem a umidade. Armazenar em local limpo e seco.

10. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES



Nunca utilize produtos a base de cloro!

- Evitar movimentos bruscos ou queda;
- Em caso de mau funcionamento, entrar em contato imediatamente com o fabricante;
- Durante a limpeza, não utilizar qualquer tipo de abrasivo ou solvente para não danificar a pintura/inox e outras superfícies sensíveis a esse tipo de produto;
- Respeite o limite de capacidade de peso do produto;
- Verifique periodicamente a estabilidade e funcionamento do produto. Caso encontre peças soltas ou o produto não esteja funcionando corretamente, entre em contato com **ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIC MEDICAL**.
- Verifique o nivelamento do móvel com o piso. Não utilizar o produto em pisos irregulares, pois o produto perderá sua estabilidade.

11. GARANTIA

A garantia dos componentes em condições normais de uso é de um ano, já incluso os 90 dias legais. Caso venha ocorrer problemas o fabricante reserva o direito de submeter a parte danificada a análise, para identificar as causas do dano ou defeito. Caso detectado que o problema ocorreu por mau uso, ou falta dos cuidados necessários, conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

Para que seu produto seja atendido em garantia, a etiqueta de informações do produto com o número de série deverá obrigatoriamente estar fixada ao mesmo. **Por isso, não retire a etiqueta!**



METALIC
Medical



‘ O fabricante se reserva o direito de alterar este manual sempre que se fizer necessário ’

Responsável Técnica
Rhaissa S. Torno
CREFITO 126286 - F