

Dedicados ao seu bem estar!

MANUAL DO USUÁRIO

Carro Maca / Maca Hospitalar



Foto meramente ilustrativa



Sob condições expressas
no presente Manual.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

METALIC MEDICAL Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá - Pinhais / PR - 83324-400

Tel.: (41) 3033-2016

Site: www.metalicmedical.com.br - Email: qualidade@metalicmedical.com.br

1. APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade **Metalic Medical**.

Política da Qualidade

“Produzir soluções em Móveis Hospitalares, atendendo as necessidades e superando a expectativa de nossos clientes. Trabalhar continuamente no aprimoramento e capacitação contínua de nossa equipe, buscando construir uma marca de excelência reconhecida por todos os seus públicos atendendo sempre os padrões exigidos.”

AVISO

- Ao receber o produto, verifique suas condições. Caso haja algum problema comunique imediatamente ao transportador ou ao fabricante;
- No decorrer do uso do produto, caso apresente algum defeito nos movimentos citados neste manual, favor contatar o serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**, caso contrário o mesmo poderá apresentar risco ao usuário;
- Caso tenha dificuldade de compreender as informações contidas neste manual, entrar em contato com serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**;
- Produtos de uso hospitalar possuem uma vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio;
- É importante usá-los da melhor maneira possível, respeitando seus limites e realizando as manutenções preventivas corretamente.

2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E UTILIZAÇÃO

Os Carro Maca são indicados para o transporte de paciente no ambiente clínico ou hospitalar. Acomoda de forma segura durante o repouso do paciente.

3. MODELOS ABRANGIDOS POR ESSE MANUAL

Modelo	Descrição	Classe de Risco
MT251	Carro Maca leito em Chapa Pintado	Classe de Risco I
MT251I	Carro Maca leito em Chapa Inox	Classe de Risco I
MT253	Carro Maca pintado Leito estofado	Classe de Risco I
MT253I	Carro Maca Inox Leito Estofado	Classe de Risco I
MT255	Carro Maca Pintado com elevação do Leito	Classe de Risco I
MT255I	Carro Maca Inox com elevação do Leito	Classe de Risco I

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos		MT251	MT251I	MT253	MT253I	MT255	MT255I
Estrutura	Aço Carbono	x		x		x	
	Aço Inoxidável		x		x		x
Leito	Leito em Chapa Aço Inoxidável / Aço Carbono	x	x			x	x
	Leito estofado em espuma revestido em corvim / napa / bagum e corino			x	x	x	x
Rodízio	Rodízio com freios em diagonal	x	x	x	x	x	x
Opcional	Grade tubular em Aço Inoxidável / Aço Carbono	x	x	x	x	x	x
	Cabeceira regulável através de cremalheira	x	x	x	x	x	x
	Colchonete hospitalar	x	x			x	x
	Rodízios zincados/ termogel/ Silicone/ Borracha	x	x	x	x	x	x
	Suporte para cilindro	x	x	x	x	x	x
	Suporte para soro/ lençol	x	x	x	x	x	x
	Pára-choque	x	x	x	x	x	x
Dimensões		0,60 x 0,80 x 1,85	0,60 x 0,80 x 1,85	0,60 x 0,80 x 1,85	0,60 x 0,80 x 1,85	0,60 x 0,80 x 1,85	0,60 x 0,80 x 1,85
Peso		34 Kg	34 Kg	29 Kg	29 Kg	34 Kg	34 Kg
Peso Grade (opcional)		1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg
Capacidade de Peso		120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg

5. MOVIMENTOS



ELEVAÇÃO DA CABECEIRA: Movimento de elevação da cabeça em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem.



ELEVAÇÃO DE LEITO: Movimento vertical do leito em relação ao chão, com retorno a posição de origem.

Obs.: Os movimentos podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS



LEGENDA

- 1 - Cabeceira;
- 2 - Leito;
- 3 - Grades laterais;
- 4 - Rodízio com freio;
- 5 - Rodízio sem freio;
- 6 - Articulação grade lateral;
- 7 - Ajuste de Cremalheira.

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

7. INSTRUÇÕES DE USO




AVISO

OBS.: Ao colocar o leito no solo, verifique se o mesmo encontra-se nivelado, afim de evitar quedas do paciente

Para abaixar as grades, segure com as duas mãos na estrutura superior, levante para destravar. Puxe-a em direção ao seu corpo conduzindo cuidadosamente para baixo, conforme 1 e 2.

Para regulagem de altura da cabeceira utilize as cremalheiras que estão localizadas embaixo do leito. Levante a cabeceira e encaixe na altura desejada.

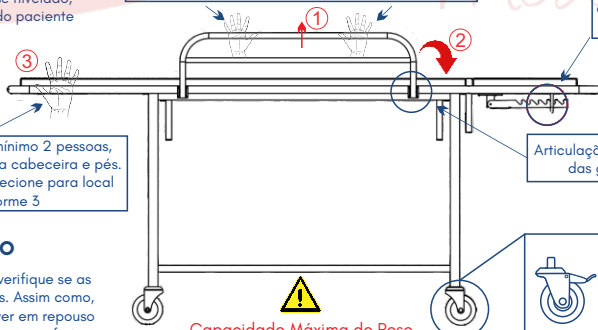

Para retirar o leito, em no mínimo 2 pessoas, segure nas laterais, próximo a cabeceira e pés. Puxe o leito para cima e direcione para local desejado. Conforme 3

Articulação de movimentação das grades laterais.



AVISO

Ao movimentar o leito, verifique se as rodas estão destravadas. Assim como, quando o paciente estiver em repouso sobre o mesmo, verifique se os freios estão acionados

Capacidade Máxima de Peso
120Kg



Anexo 4

FREIO DESATIVADO

FREIO ACIONADO

8. MANUTENÇÃO

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

- Toda manutenção deverá ser feita por pessoa capacitada e habilitada, utilizando ferramentas e materiais adequados para cada situação, caso contrário, ferimentos ou danos podem ocorrer;
- Para melhor conservação do produto, aconselha-se reaperto de parafusos e conexões a cada 6 (seis) meses de uso;
- O uso ou substituição de qualquer item, acessório, ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário;
- Para manutenção corretiva o fabricante dispõe de assistência técnica que poderá efetuar troca e/ou manutenção de produtos, componentes e/ou opcionais que apresentem quebra e/ou desgaste natural pelo uso, mediante solicitação do comprador.
- No caso de algum problema entrar em contato com:



ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL

Rua Nova Esperança, 1004. Emiliano Pernetá

CEP: 83324-400 - Pinhais - PR - BRASIL

Tel: (41) 3033-2016

E-mail: qualidade@metalicmedical.com.br

9. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Nunca use produtos de limpeza a base de cloro nem palha de aço na limpeza de produtos hospitalares **METALIC MEDICAL**;
- Sempre antes ou após a utilização dos produtos hospitalares da **METALIC MEDICAL**, o operador deverá realizar a limpeza do produto utilizando um pano limpo, levemente umedecido com água ou álcool 70%, retirando o excesso com um pano limpo e seco;
- Não utilizar qualquer tipo de abrasivo, pois os resíduos do mesmo comprometem a resistência à corrosão;
- Não utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura, o aço inox ou o estofado.

10. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Não expor diretamente ao sol, nem a umidade. Armazenar em local limpo e seco.

11. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Evitar movimentos bruscos ou queda;
- Em caso de mau funcionamento, entrar em contato imediatamente com o fabricante;
- Durante a limpeza, não utilizar qualquer tipo de abrasivo ou solvente para não danificar a pintura/inox e outras superfícies sensíveis a esse tipo de produto;
- Respeite o limite de capacidade de peso do produto;
- Verifique periodicamente a estabilidade e funcionamento do produto. Caso encontre peças soltas ou o produto não esteja funcionando corretamente, entre em contato com **ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIC MEDICAL**.
- Verifique o nivelamento do móvel com o piso. Não utilizar o produto em pisos irregulares, pois o produto perderá sua estabilidade.

12. GARANTIA

A garantia dos componentes em condições normais de uso é de um ano, já incluso os 90 dias legais. Caso venha ocorrer problemas, o fabricante reserva o direito de submeter a parte danificada a análise, para identificar as causas do dano ou defeito. Caso detectado que o problema ocorreu por mau uso, ou falta dos cuidados necessários, conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

Para que seu produto seja atendido em garantia, a etiqueta de informações do produto com o número de série deverá obrigatoriamente estar fixada ao mesmo. **Por isso, não retire a etiqueta!**



' O fabricante se reserva o direito de alterar este manual sempre que se fizer necessário '

Responsável Técnica
Rhaissa S. Torno
CREFITO 126286 - F