

Dedicados ao seu bem estar!

MANUAL DO USUÁRIO

Escada



Foto meramente ilustrativa



Sob condições expressas
no presente Manual.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

METALIC MEDICAL Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá - Pinhais / PR - 83324-400

Tel.: (41) 3033-2016

Site: www.metalicmedical.com.br - Email: qualidade@metalicmedical.com.br

1. APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Metalic Medical.

Política da Qualidade

“Produzir soluções em Móveis Hospitalares, atendendo as necessidades e superando a expectativa de nossos clientes. Trabalhar continuamente no aprimoramento e capacitação contínua de nossa equipe, buscando construir uma marca de excelência reconhecida por todos os seus públicos atendendo sempre os padrões exigidos.”



AVISO

- Ao receber o produto, verifique suas condições. Caso haja algum problema comunique imediatamente ao transportador ou ao fabricante;
- No decorrer do uso do produto, caso apresente algum defeito nos movimentos citados neste manual, favor contatar o serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**, caso contrário o mesmo poderá apresentar risco ao usuário;
- Caso tenha dificuldade de compreender as informações contidas neste manual, entrar em contato com serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**;
- Produtos de uso hospitalar possuem uma vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio;
- É importante usa-los da melhor maneira possível, respeitando seus limites e realizando as manutenções preventivas corretamente.

2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E UTILIZAÇÃO

As Escadas são indicadas para facilitar o alcance/acesso ao leito do paciente em ambiente clínico e hospitalar.

3. MODELOS ABRANGIDOS POR ESSE MANUAL

Modelo	Descrição	Registro Anvisa
MT329	ESCADA 2 DEGRAUS LUXO	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO (ANVISA)
MT330	ESCADA 1 DEGRAU - PINTADA	
MT331	ESCADA 2 DEGRAUS - PINTADA	
MT333	ESCADA 2 DEGRAUS - INOX	
MT336	ESCADA 2 DEGRAUS PINTADA ACAB. INOX	
MT339	ESCADA 2 DEGRAUS PINTADA COM PISO ALUMINIO	
MT1763	ESCADA 2 DEGRAUS INOX ACAB. INOX	
MT2474	ESCADA 2 DEGRAUS INOX PISO DE ALUMINIO	
MT2477	ESCADA 2 DEGRAUS PINTADA PISO EM CHAPA	
MT3151	ESCADA 1 DEGRAU - INOX	

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações		MT329	MT330	MT331	MT333	MT336	MT339	MT1763	MT2474	MT2477	MT3151
Estrutura	Aço Carbono		x	x		x	x				
	Aço Inoxidável				x			x	x	x	x
	MDF	x									
Qtde. degraus	1 Degrau		x								x
	2 Degraus	x		x	x	x	x	x	x	x	
Piso	Borracha	x	x	x	x	x	x				x
	Alumínio						x		x		
	Chapa									x	
Acabamento	Sem Acabamento	x	x	x	x		x		x	x	x
	Acabamento Inox					x		x			
Dimensões		0,44 x 0,34 x 0,48	0,39 x 0,22 x 0,28	0,44 x 0,34 x 0,48	0,44 x 0,34 x 0,48	0,44 x 0,34 x 0,48	0,44 x 0,34 x 0,48	0,44 x 0,34 x 0,48	0,44 x 0,34 x 0,48	0,44 x 0,34 x 0,48	0,39 x 0,22 x 0,28
		(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)
Peso		5 Kg	2 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	2 Kg
Capacidade Máxima de Peso		120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg



Capacidade Máxima de Peso 120Kg

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Escada Dois Degraus Pintada



LEGENDA

- 1 - Piso com Borracha EVA;
2. Ponteiros em PVC;
3. Estrutura em Aço Carbono/Inox.

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.



Não utilize o produto em pisos desnivelados!

6. FUNCIONAMENTO

A escada tem como principal objetivo facilitar a subida para acomodação do paciente ao leito. A mesma deve ficar alinhada a lateral do leito. Para segurança do paciente, garanta que a escada esteja apoiada em superfície plana, com os quatro apoios encostados no chão. Os pés devem apoiar-se de forma centralizada no degrau da escada, evitando assim qualquer desequilíbrio ou instabilidade do produto e do usuário.

7. MANUTENÇÃO

- Toda manutenção deverá ser feita por pessoa capacitada e habilitada, utilizando ferramentas e materiais adequados para cada situação, caso contrário, ferimentos ou danos podem ocorrer;
- Para melhor conservação do produto, aconselha-se reaperto de parafusos e conexões a cada 6 (seis) meses de uso;
- O uso ou substituição de qualquer item, acessório, ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário;
- Para manutenção corretiva o fabricante dispõe de assistência técnica que poderá efetuar troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e/ou opcionais que apresentem quebra e/ou desgaste natural pelo uso, mediante solicitação do comprador.
- No caso de algum problema entrar em contato com:



ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL

Rua Nova Esperança, 1004. Emiliano Pernetá

CEP: 83324-400 - Pinhais - PR - BRASIL

Tel: (41) 3033-2016

E-mail: qualidade@metallicmedical.com.br

8. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Nunca use produtos de limpeza a base de cloro nem palha de aço na limpeza de produtos hospitalares **METALIC MEDICAL**;
- Sempre antes ou após a utilização dos produtos hospitalares da **METALIC MEDICAL**, o operador deverá realizar a limpeza do produto utilizando um pano limpo, levemente umedecido com água ou álcool 70%, retirando o excesso com um pano limpo e seco.
- Não utilizar qualquer tipo de abrasivo, pois os resíduos do mesmo comprometem a resistência à corrosão.
- Não utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura, o aço inox ou a borracha.

9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Não expor diretamente ao sol, nem a umidade. Armazenar em local limpo e seco.

10. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Evitar movimentos bruscos ou queda;
- Em caso de mau funcionamento, entrar em contato imediatamente com o fabricante;
- Durante a limpeza, não utilizar qualquer tipo de abrasivo ou solvente para não danificar a pintura/inox e outras superfícies sensíveis a esse tipo de produto;
- Respeite o limite de capacidade de peso do produto;
- Verifique periodicamente a estabilidade e funcionamento do produto. Caso encontre peças soltas ou o produto não esteja funcionando corretamente, entre em contato com **ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIC MEDICAL**.
- Verifique o nivelamento do móvel com o piso. Não utilizar o produto em pisos irregulares, pois o produto perderá sua estabilidade.

11. GARANTIA

A garantia dos componentes em condições normais de uso é de um ano, já incluso os 90 dias legais. Caso venha ocorrer problemas, o fabricante reserva o direito de submeter a parte danificada a análise, para identificar as causas do dano ou defeito. Caso detectado que o problema ocorreu por mau uso, ou falta dos cuidados necessários, conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

Para que seu produto seja atendido em garantia, a etiqueta de informações do produto com o número de série deverá obrigatoriamente estar fixada ao mesmo. **Por isso, não retire a etiqueta!**



METALIC

Medical



' O fabricante se reserva o direito de alterar este manual sempre que se fizer necessário'

Responsável Técnica
Rhaissa S. Torno
CREFITO 126286 - F