

Dedicados ao seu bem estar!

MANUAL DO USUÁRIO

Mesas Ginecológicas



Foto meramente ilustrativa



Sob condições expressas
no presente Manual.



ANVISA

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

METALIC MEDICAL Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá - Pinhais / PR - 83324-400

Tel.: (41) 3033-2016

Site: www.metalicmedical.com.br - Email: qualidade@metalicmedical.com.br

5. MOVIMENTOS



POSIÇÃO HORIZONTAL: Posição horizontal do leito em relação ao chão, com retorno a posição de origem.



DORSO: Movimento de elevação da seção do dorso em relação ao plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem.




SENTADO: Movimento do dorso e apoio dos pés, possibilitando a posição sentado, com retorno a posição de origem.

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Anexo 1

 **Capacidade Máxima de Peso 130Kg**

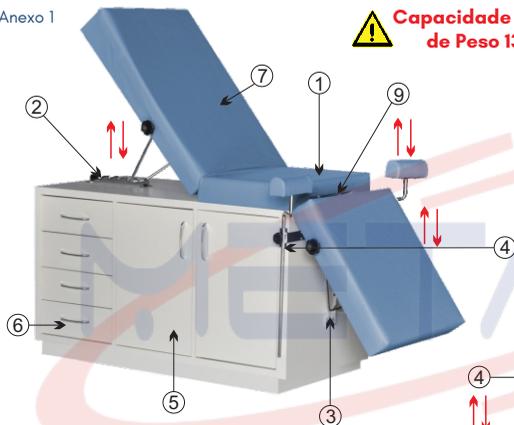

LEGENDA ANEXO 1

- 1 - Assento fixo;
- 2 - Cremalheira Regulagem do dorso;
- 3 - Cremalheira Regulagem dos pés;
- 4 - Porta Coxa Altura Regulável;
- 5 - Portas com abertura 90 ;
- 6 - Gavetas com corrediças de apoio;
- 7 - Dorso
- 8 - Apoio dos pés;
- 9 - Gaveta de escoamento de líquidos.

Anexo 2

LEGENDA ANEXO 2

- 1 - Assento fixo;
- 2 - Cremalheira Regulagem do dorso;
- 3 - Cremalheira Regulagem dos pés;
- 4 - Porta Coxa Altura Regulável;
- 5 - Apoio dos pés;
- 6 - Gaveta de Escoamento de líquidos;
- 7 - Dorso;
- 8 - Suporte para balde.



7. FUNCIONAMENTO

Todo funcionamento é feito de maneira mecânica. Os movimentos do leito são executados a partir do ajuste e encaixe das cremalheiras localizada abaixo do mesmo. Basta movimentar a cremalheira e encaixar na posição desejada, conforme setas indicativas de ambos anexos - Legenda 2 e 3.

O ajuste do porta-coxa é feito através do manipulô rosqueável localizado em sua lateral. Para posicionar a altura desejada, afrouxe o manipulô, posicione na altura desejada e reaperte o mesmo, conforme setas indicativas em ambos anexos - Legenda 4.

8. MANUTENÇÃO

- Toda manutenção deverá ser feita por pessoa capacitada e habilitada, utilizando ferramentas e materiais adequados para cada situação, caso contrário, ferimentos ou danos podem ocorrer;
- Para melhor conservação do produto, aconselha-se reaperto de parafusos e conexões a cada 6 (seis) meses de uso;

- O uso ou substituição de qualquer item, acessório, ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário;
- Para manutenção corretiva o fabricante dispõe de assistência técnica que poderá efetuar troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e/ou opcionais que apresentem quebra e/ou desgaste natural pelo uso, mediante solicitação do comprador.
- No caso de algum problema entrar em contato com:



ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL

Rua Nova Esperança, 1004. Emiliano Pernetá
 CEP: 83324-400 - Pinhais - PR - BRASIL
 Tel: (41) 3033-2016
 E-mail: qualidade@metalicmedical.com.br

9. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Nunca use produtos de limpeza a base de cloro nem palha de aço na limpeza de produtos hospitalares **METALIC MEDICAL**;
- Sempre antes ou após a utilização dos produtos hospitalares da **METALIC MEDICAL**, o operador deverá realizar a limpeza do produto utilizando um pano limpo, levemente umedecido com água ou álcool 70%, retirando o excesso com um pano limpo e seco.
- Não utilizar qualquer tipo de abrasivo, pois os resíduos do mesmo comprometem a resistência à corrosão.
- Não utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura, o aço inox ou os estofados.

10. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Não expor diretamente ao sol, nem a umidade. Armazenar em local limpo e seco.

11. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Evitar movimentos bruscos ou queda;
- Em caso de mau funcionamento, entrar em contato imediatamente com o fabricante;
- Durante a limpeza, não utilizar qualquer tipo de abrasivo ou solvente para não danificar a pintura/inox e outras superfícies sensíveis a esse tipo de produto;
- Respeite o limite de capacidade de peso do produto;
- Verifique periodicamente a estabilidade e funcionamento do produto. Caso encontre peças soltas ou o produto não esteja funcionando corretamente, entre em contato com **ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIC MEDICAL**.
- Verifique o nivelamento do móvel com o piso. Não utilizar o produto em pisos irregulares, pois o produto perderá sua estabilidade.

12. GARANTIA

A garantia dos componentes em condições normais de uso é de um ano, já incluso os 90 dias legais. Caso venha ocorrer problemas o fabricante reserva o direito de submeter a parte danificada a análise, para identificar as causas do dano ou defeito. Caso detectado que o problema ocorreu por mau uso, ou falta dos cuidados necessários, conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

Para que seu produto seja atendido em garantia, a etiqueta de informações do produto com o número de série deverá obrigatoriamente estar fixada ao mesmo. **Por isso, não retire a etiqueta!**



' O fabricante se reserva o direito de alterar este manual sempre que se fizer necessário '

Responsável Técnica
 Rhaissa S. Torno
 CREFITO 126286 - F