

- Não utilizar qualquer tipo de abrasivo, pois os resíduos do mesmo comprometem a resistência à corrosão.
- Não utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura, o aço inox ou os estofados.

10. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES



Nunca utilize produtos a base de cloro!

- Evitar movimentos bruscos ou queda;
- Em caso de mau funcionamento, entrar em contato imediatamente com o fabricante;
- Durante a limpeza, não utilizar qualquer tipo de abrasivo ou solvente para não danificar a pintura/inox e outras superfícies sensíveis a esse tipo de produto;
- Verifique periodicamente a estabilidade e funcionamento do produto. Caso encontre peças soltas ou o produto não esteja funcionando corretamente, entre em contato com **ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIC MEDICAL**.
- Verifique o nivelamento do móvel com o piso. Não utilizar o produto em pisos irregulares, pois o produto perderá sua estabilidade.

11. GARANTIA


A garantia dos componentes em condições normais de uso é de um ano, já incluso os 90 dias legais. Caso venha ocorrer problemas o fabricante reserva o direito de submeter a parte danificada a análise, para identificar as causas do dano ou defeito. Caso detectado que o problema ocorreu por mau uso, ou falta dos cuidados necessários, conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

Para que seu produto seja atendido em garantia, a etiqueta de informações do produto com o número de série deverá obrigatoriamente estar fixada ao mesmo. **Por isso, não retire a etiqueta!**



MANUAL DO USUÁRIO

Foco Clínico

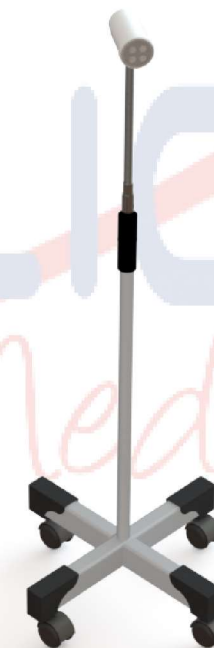

Sob condições expressas no presente Manual.



'O fabricante se reserva o direito de alterar este manual sempre que se fizer necessário'

Responsável Técnica
Rhaissa S. Torno
CREFITO 126286 - F

Rev. 01

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

METALIC MEDICAL Produtos Hospitalares Ltda.
Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá - Pinhais / PR - 83324-400
Tel.: (41) 3033-2016
Site: www.metalicmedical.com.br - Email: qualidade@metalicmedical.com.br

1. APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Metalic Medical.

Política da Qualidade

"Produzir soluções em Móveis Hospitalares, atendendo as necessidades e superando a expectativa de nossos clientes. Trabalhar continuamente no aprimoramento e capacitação contínua de nossa equipe, buscando construir uma marca de excelência reconhecida por todos os seus públicos atendendo sempre os padrões exigidos."



AVISO

- Ao receber o produto, verifique suas condições. Caso haja algum problema comunique imediatamente ao transportador ou ao fabricante;
- No decorrer do uso do produto, caso apresente algum defeito nos movimentos citados neste manual, favor contatar o serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**, caso contrário o mesmo poderá apresentar risco ao usuário;
- Caso tenha dificuldade de compreender as informações contidas neste manual, entrar em contato com serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**;
- Produtos de uso hospitalar possuem uma vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio;
- É importante usa-los da melhor maneira possível, respeitando seus limites e realizando as manutenções preventivas corretamente.

2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E UTILIZAÇÃO

O Foco Clínico é indicado para iluminar o corpo do paciente no espectro visível e auxiliar a equipe médica durante os procedimentos clínicos e ambulatoriais.

3. MODELOS ABRANGIDOS POR ESSE MANUAL

Modelo	Descrição	Classe de Risco
MT378	Luminária Flex Altura Regulável 4 Pés INOX - BIVOLT	Classe de Risco I
MT381	Luminária Flex Altura Regulável 4 Pés INOX com rodas - BIVOLT	Classe de Risco I
MT384	Luminária Flex Altura Regulável 4 Pés Pintada - BIVOLT	Classe de Risco I
MT387	Luminária Flex Altura Regulável 4 Pés Pintada com Rodas - BIVOLT	Classe de Risco I
MT388	Luminária Flex Altura Regulável 5 Pés Pintado com Rodas - BIVOLT	Classe de Risco I
MT389	Luminária Flex Altura Regulável 5 Pés INOX com rodas - BIVOLT	Classe de Risco I

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	MT378	MT381	MT384	MT387	MT388	MT389
Estrutura	Aço Carbono		x	x	x	
	Aço Inox	x	x			x
Rodízio	Com Rodízio		x	x	x	x
	Sem Rodízio	x		x		
Potência (Lâmpada)	5 watts	5 watts	5 watts	5 watts	5 watts	5 watts
Voltagem	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Dimensões	1,22x0,4	1,28x0,4	1,22x0,4	1,28x0,4	1,28x0,4	1,28x0,4
	5x0,45 (AxLxC)	5x0,45 (AxLxC)	5x0,45 (AxLxC)	5x0,45 (AxLxC)	5x0,45 (AxLxC)	5x0,45 (AxLxC)
Peso do Produto	2,6Kg	2,6Kg	2,6 Kg	2,6Kg	2,6Kg	2,6Kg

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.


5. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Não expor diretamente ao sol, nem a umidade. Armazenar em local limpo e seco.



Não apoiar nenhum objeto sobre o produto!

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

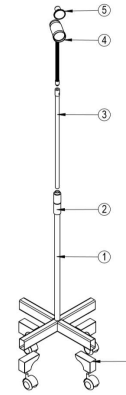

LEGENDA

- 1 - Estrutura;
- 2 - Mandril para regulagem de altura;
- 3 - Haste Cromada;
- 4 - Cúpula;
- 5 - Lâmpada;
- 6 - Ponteira PPS e rodízios 2".

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

7. INSTRUÇÕES DE USO



AVISO

Não apoiar nada sobre o produto!


Para ligar o equipamento conecte-o a uma fonte de energia. O mesmo pode ser usado em voltagem 110 ou 220v, sem necessidade de nenhuma mudança no equipamento.

Ajuste a altura por meio do mandril de acordo com a necessidade.



AVISO

Não utilize abrasivos e solventes para limpeza dos produtos!
Consulte neste manual, orientação no Item Limpeza e Desinfecção.

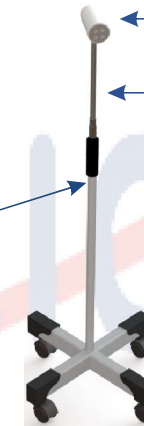

Para ligar o foco, aperte o botão que está localizado na parte posterior da cúpula.

Para ajustar a direção do foco clínico, movimente a haste flexível de acordo com a necessidade.



AVISO

Verifique se o piso está nivelado antes do uso. NÃO UTILIZE EM PISOS IRREGULARES!

Na ausência de uma das ponteiras ou rodízios, não utilize o produto. O mesmo pode gerar instabilidade durante o uso!

Se houver algum fio aparente ou deslocamento da lâmpada, contate a Assistência Técnica da Metalic Medical.

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

8. MANUTENÇÃO

- Toda manutenção deverá ser feita por pessoa capacitada e habilitada, utilizando ferramentas e materiais adequados para cada situação, caso contrário, ferimentos ou danos podem ocorrer;
- Para melhor conservação do produto, aconselha-se reaperto de parafusos e conexões a cada 6 (seis) meses de uso;
- O uso ou substituição de qualquer item, acessório, ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário;
- Para manutenção corretiva o fabricante dispõe de assistência técnica que poderá efetuar troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e/ou opcionais que apresentem quebra e/ou desgaste natural pelo uso, mediante solicitação do comprador;
- No caso de algum problema entrar em contato com:



ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL

Rua Nova Esperança, 1004. Emiliano Pernetá
CEP: 83324-400 - Pinhais - PR - BRASIL
Tel: (41) 3033-2016
E-mail: qualidade@metalicmedical.com.br

9. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Nunca use produtos de limpeza a base de cloro nem palha de aço na limpeza de produtos hospitalares **METALIC MEDICAL**;
- Sempre antes ou após a utilização dos produtos hospitalares da **METALIC MEDICAL**, o operador deverá realizar a limpeza do produto utilizando um pano limpo, levemente umedecido com água ou álcool 70%, retirando o excesso com um pano limpo e seco.