

Dedicados ao seu bem estar!

MANUAL DO USUÁRIO

Suporte de Soro



Sob condições expressas
no presente Manual.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

METALIC MEDICAL Produtos Hospitalares Ltda.
Rua Nova Esperança, 962 - Emiliano Pernetá - Pinhais / PR - 83324-400
Tel.: (41) 3033-2016
Site: www.metalicmedical.com.br - Email: qualidade@metalicmedical.com.br

1. APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Metalic Medical.

Política da Qualidade

“Produzir soluções em Móveis Hospitalares, atendendo as necessidades e superando a expectativa de nossos clientes. Trabalhar continuamente no aprimoramento e capacitação contínua de nossa equipe, buscando construir uma marca de excelência reconhecida por todos os seus públicos atendendo sempre os padrões exigidos.”



- Ao receber o produto, verifique suas condições. Caso haja algum problema comunique imediatamente ao transportador ou ao fabricante;
- No decorrer do uso do produto, caso apresente algum defeito nos movimentos citados neste manual, favor contatar o serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**, caso contrário o mesmo poderá apresentar risco ao usuário;
- Caso tenha dificuldade de compreender as informações contidas neste manual, entrar em contato com serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**;
- Produtos de uso hospitalar possuem uma vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio;
- É importante usa-los da melhor maneira possível, respeitando seus limites e realizando as manutenções preventivas corretamente.

2. INDICAÇÃO DE USO

O Suporte de soro é um acessório hospitalar que serve para ser utilizado em clínicas médicas, ambulatórios, clínicas de estética, entre outras instalações médicas para auxiliar o transporte e manuseamento do soro.

3. MODELOS ABRANGIDOS POR ESSE MANUAL

Modelo	Descrição	Registro Anvisa
MT510	SUPORTE PARA SORO DE PAREDE GIRATÓRIO - PINTADO	
MT512	SUPORTE PARA SORO ALTURA FIXA 4 PÉS COM RODAS - INOX	
MT513	SUPORTE PARA SORO DE PAREDE GIRATÓRIO - INOX	
MT514	SUPORTE PARA SORO ALTURA FIXA 4 PÉS SEM RODAS - PINTADO	
MT530i	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL COM 4 RODAS - PINTADO COM HASTE INOX	
MT532i	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL COM 4 PÉS SEM RODAS - INOX	80883970001
MT534i	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL 4 PÉS COM RODAS - INOX	
MT537i	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL 4 PÉS SEM RODAS - INOX	
MT3325	SUPORTE PARA SORO ALTURA FIXA COM BASE EM NYLON 5 RODAS - PINTADO	
MT2229	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL BASE NYLON 5 PÉS COM RODAS - INOX	
MT2425	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL COM BASE EM ALUMÍNIO 5 PÉS COM RODAS	
MT2719i	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL COM BASE EM NYLON 5 PÉS COM RODAS - PINTADO COM HASTE INOX	

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações	MT510	MT512	MT513	MT514	MT530i	MT532i
Estrutura	Aço Carbono	x		x	x	x
	Aço Inoxidável		x			
	Cromado	x			x	
Estrutura Haste	Aço Inoxidável		x		x	x
	Com Rodízio		x		x	
	Sem Rodízio	x		x		x
Manipulo de Regulagem	Sim				x	x
	Não	x	x	x		
Dimensões	0,25 x 1,15 x 0,45 (LxAxC)	0,34 x 2,00 x 0,43 (LxAxC)	0,25 x 1,15 x 0,45 (LxAxC)	0,34 x 2,00 x 0,43 (LxAxC)	0,34 x 1,70 x 0,43 (LxAxC)	0,34 x 1,80 x 0,43 (LxAxC)
	Peso	5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg


Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

Especificações		MT534I	MT537I	MT3325	MT2229	MT2425	MT2719I
Estrutura	Aço Carbono			x			x
	Aço Inoxidável	x	x		x	x	
Estrutura Haste	Cromado			x			
	Aço Inoxidável	x	x		x	x	x
Rodízio (Opcional)	Com Rodízio	x		x	x	x	x
	Sem Rodízio		x				
Manipulo de Regulagem	Sim	x	x			x	x
	Não			x	x		
Dimensões		0,34 x 1,70 x 0,43 (LxAxC)	0,34 x 1,70 x 0,43 (LxAxC)	0,34 x 2,00 x 0,43 (LxAxC)	0,68x1,90x0,57 (LxAxC)	0,34 x 2,00 x 0,43 (LxAxC)	0,34 x 2,00 x 0,43 (LxAxC)
Peso		5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Não utilize o produto em pisos desnivelados!

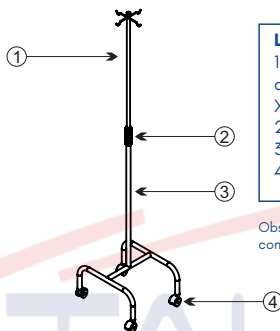

LEGENDA

1. Haste móvel em formato T com quatro ganchos no topo dispostos em X para fixação de soro;
2. Regulador de altura (tipo mandril);
3. Haste fixa;
4. Pés com rodízios giratórios de 2"

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

6. FUNCIONAMENTO

1. Antes de usar o equipamento, verifique se o mesmo está nivelado ao chão;
2. Para ajustar a altura, com uma das mãos segurar a haste (fixa) e com a outra mão girar o regulador de altura (tipo mandril) no sentido anti-horário para soltar a haste (móvel). (Conforme desenho explicativo - Item 5);
3. Em seguida descer e subir a haste (móvel) para a altura desejada (Conforme desenho explicativo - Item 5);
4. Fixe o aparelho na posição desejada girando o regulador de altura no sentido horário;
5. Certifique que o regulador de altura (tipo mandril) esteja apertado para não ocorrer risco de movimentação dos componentes ajustados.
6. Colocar as bolsas nos ganchos pendurando nos encaixes existentes.

7. MANUTENÇÃO

- Toda manutenção deverá ser feita por pessoa capacitada e habilitada, utilizando ferramentas e materiais adequados para cada situação, caso contrário, ferimentos ou danos podem ocorrer;
- Para melhor conservação do produto, aconselha-se reaperto de parafusos e conexões a cada 6 (seis) meses de uso;
- O uso ou substituição de qualquer item, acessório, ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário;
- Para manutenção corretiva o fabricante dispõe de assistência técnica que poderá efetuar troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e/ou opcionais que apresentem quebra e/ou desgaste natural pelo uso, mediante solicitação do comprador.
- No caso de algum problema entrar em contato com:



ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL

Rua Nova Esperança, 962. Emiliano Pernetá
 CEP: 85324-400 - Pinhais - PR - BRASIL
 Tel: (41) 3033-2016
 E-mail: qualidade@metalicmedical.com.br

8. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Nunca use produtos de limpeza a base de cloro nem palha de aço na limpeza de produtos hospitalares **METALIC MEDICAL**;

- Sempre antes ou após a utilização dos produtos hospitalares da **METALIC MEDICAL**, o operador deverá realizar a limpeza do produto utilizando um pano limpo, levemente umedecido com água ou álcool 70%, retirando o excesso com um pano limpo e seco.
- Não utilizar qualquer tipo de abrasivo, pois os resíduos do mesmo comprometem a resistência à corrosão.
- Não utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura, o aço inox ou a borracha.

9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Não expor diretamente ao sol, nem a umidade. Armazenar em local limpo e seco.

10. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Não utilize o suporte de soro para outra finalidade;
- Evitar movimentos bruscos ou queda;
- Em caso de mau funcionamento, entrar em contato imediatamente com o fabricante;
- Durante a limpeza, não utilizar qualquer tipo de abrasivo ou solvente para não danificar a pintura/inox e outras superfícies sensíveis a esse tipo de produto;
- Verifique periodicamente a estabilidade e funcionamento do produto. Caso encontre peças soltas ou o produto não esteja funcionando corretamente, entre em contato com **ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIC MEDICAL**.
- Verifique o nivelamento do móvel com o piso. Não utilizar o produto em pisos irregulares, pois o produto perderá sua estabilidade.
- Ao se locomover com o suporte de soro, faça-o cuidadosamente, nunca utilize o mesmo como apoio para o corpo.
- Garanta que o regulador de altura (tipo mandril) esteja devidamente apertado para que não movimente a haste móvel de forma indesejada.

11. GARANTIA

A garantia dos componentes em condições normais de uso é de um ano, já incluso os 90 dias legais. Caso venha ocorrer problemas, o fabricante reserva o direito de submeter a parte danificada a análise, para identificar as causas do dano ou defeito. Caso detectado que o problema ocorreu por mau uso, ou falta dos cuidados necessários, conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

Para que seu produto seja atendido em garantia, a etiqueta de informações do produto com o número de série deverá obrigatoriamente estar fixada ao mesmo. **Por isso, não retire a etiqueta!**



	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. CNPJ: 05.788.117/0001-03 Rua Nova Esperança, 962 - CEP: 83.324-400 Pinhais/PR - Brasil
	MT530i Suporte para Soro altura regulável com 4 rodas - Pintado com haste Inox
NS:09460 - 001	ANVISA Nº: 80883970001
Resp. Técnica: Rhaissa S. T. Stokloski Crefito: 168286-F	Tel.: 41 3033 2016 www.metalicmedical.com.br metalicmedical@metalicmedical.com.br



'O fabricante se reserva o direito de alterar este manual sempre que se fizer necessário'

Responsável Técnica
 Rhaissa S. Torno
 CREFITO 126286 - F