

Dedicados ao seu bem estar!

MANUAL DO USUÁRIO

Berço Recém Nascido



Foto meramente ilustrativa



Sob condições expressas
no presente Manual.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

METALIC MEDICAL Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá - Pinhais / PR - 83324-400

Tel.: (41) 3033-2016

Site: www.metalicmedical.com.br - Email: qualidade@metalicmedical.com.br

1. APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Metallic Medical.

Política da Qualidade

“Produzir soluções em Móveis Hospitalares, atendendo as necessidades e superando a expectativa de nossos clientes. Trabalhar continuamente no aprimoramento e capacitação contínua de nossa equipe, buscando construir uma marca de excelência reconhecida por todos os seus públicos atendendo sempre os padrões exigidos.”



- Ao receber o produto, verifique suas condições. Caso haja algum problema comunique imediatamente ao transportador ou ao fabricante;
- No decorrer do uso do produto, caso apresente algum defeito nos movimentos citados neste manual, favor contatar o serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**, caso contrário o mesmo poderá apresentar risco ao usuário;
- Caso tenha dificuldade de compreender as informações contidas neste manual, entrar em contato com serviço de **ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL**;
- Produtos de uso hospitalar possuem uma vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio;
- É importante usa-los da melhor maneira possível, respeitando seus limites e realizando as manutenções preventivas corretamente.

2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E UTILIZAÇÃO

Indicado para acomodação e repouso do recém nascido, podendo ser usado no ambiente clínico e hospitalar.

3. MODELOS ABRANGIDOS POR ESSE MANUAL

Modelo	Descrição	Classe de Risco
MT131	BERÇO RECÉM NASCIDO C CUNA ACRÍLICA - PINTADO	Classe de Risco I
MT133	BERÇO RECÉM NASCIDO C CUNA ACRÍLICA - INOX	Classe de Risco I
MT135	BERÇO RECEM NASCIDO C CUNA ACRÍLICA C PRATELEIRA - PINTADO	Classe de Risco I
MT137	BERÇO RECEM NASCIDO C CUNA ACRILICA C PRATEEIRA - INOX	Classe de Risco I

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações		MT131	MT133	MT135	MT137
Estrutura	Aço Carbono	x		x	
	Aço Inoxidável		x		x
Leito	Cuna Acrílica	x	x	x	x
Prateleira	Com Prateleira			x	x
	Sem Prateleira	x	x		
Pés	Rodízio	x	x	x	x
Dimensões		0,74 x 0,90 x			
		0,42	0,42	0,42	0,42
		(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)	(LxAxC)
	Peso	6,5 Kg	6,5 Kg	8,5 Kg	8,5 Kg
Capacidade de Carga		8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg




Capacidade Máxima de Peso 8Kg

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

5. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Não expor diretamente ao sol, nem a umidade. Armazenar em local limpo e seco.

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

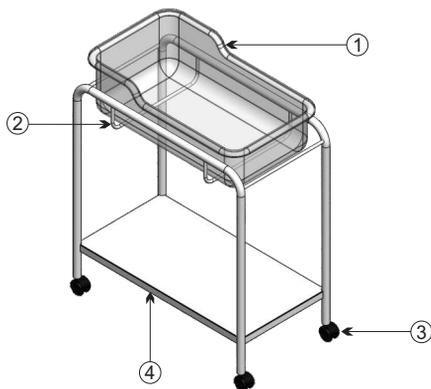

LEGENDA

- 1 - Cesto Acrílico;
- 2 - Estrutura base para cesto;
- 3 - Rodízio de 2" com freio em diagonal;
- 4 - Prateleira.

Obs.: Os componentes podem variar de acordo com o modelo adquirido pelo cliente.

7. INSTRUÇÕES DE USO



AVISO

Respeite a capacidade máxima de peso do produto!

Para uso do berço, verifique se o cesto acrílico está devidamente encaixado em sua estrutura. Conforme seta indicativa na imagem ao lado.

Rodízios - Para acionar o freio pressione a alavanca para baixo. Processo inverso para liberar movimentação do rodízio.



Para movimentação do cesto, utilize as bordas arredondadas ao redor do cesto.



FRÁGIL

Os cestos de acrílico são frágeis a quedas. Caso isso ocorra, verificar se há algum dano de risco, trinca ou quebra. **Nesse caso, o cesto deve ser descartado de forma imediata.**

8. MANUTENÇÃO

- Toda manutenção deverá ser feita por pessoa capacitada e habilitada, utilizando ferramentas e materiais adequados para cada situação, caso contrário, ferimentos ou danos podem ocorrer;
- Para melhor conservação do produto, aconselha-se reaperto de parafusos e conexões a cada 6 (seis) meses de uso;
- O uso ou substituição de qualquer item, acessório, ou material não especificado, é de inteira responsabilidade do usuário;
- Para manutenção corretiva o fabricante dispõe de assistência técnica que poderá efetuar troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e/ou opcionais que apresentem quebra e/ou desgaste natural pelo uso, mediante solicitação do comprador;
- No caso de algum problema entrar em contato com:

ATENDIMENTO AO CLIENTE METALIC MEDICAL

Rua Nova Esperança, 1004. Emiliano Pernetá
CEP: 85324-400 - Pinhais - PR - BRASIL
Tel: (41) 3033-2016
E-mail: qualidade@metallicmedical.com.br

9. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Nunca use produtos de limpeza a base de cloro nem palha de aço na limpeza de produtos hospitalares **METALIC MEDICAL**;
- Sempre antes ou após a utilização dos produtos hospitalares da **METALIC MEDICAL**, o operador deverá realizar a limpeza do produto utilizando um pano limpo, levemente umedecido com água ou álcool 70%, retirando o excesso com um pano limpo e seco.
- Não utilizar qualquer tipo de abrasivo, pois os resíduos do mesmo comprometem a resistência à corrosão.
- Não utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura ou aço inox.



Nunca utilize produtos a base de cloro!

10. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Não expor diretamente ao sol, nem a umidade. Armazenar em local limpo e seco.

11. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Evitar movimentos bruscos ou queda;
- Em caso de mau funcionamento, entrar em contato imediatamente com o fabricante;
- Durante a limpeza, não utilizar qualquer tipo de abrasivo ou solvente para não danificar a pintura/inox e outras superfícies sensíveis a esse tipo de produto;
- Respeite o limite de capacidade de peso do produto;
- Verifique periodicamente a estabilidade e funcionamento do produto. Caso encontre peças soltas ou o produto não esteja funcionando corretamente, entre em contato com **ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIC MEDICAL**.
- Verifique o nivelamento do móvel com o piso. Não utilizar o produto em pisos irregulares, pois o produto perderá sua estabilidade.

12. GARANTIA

A garantia dos componentes em condições normais de uso é de um ano, já incluso os 90 dias legais. Caso venha ocorrer problemas o fabricante reserva o direito de submeter a parte danificada a análise, para identificar as causas do dano ou defeito. Caso detectado que o problema ocorreu por mau uso, ou falta dos cuidados necessários, conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

Para que seu produto seja atendido em garantia, a etiqueta de informações do produto com o número de série deverá obrigatoriamente estar fixada ao mesmo. **Por isso, não retire a etiqueta!**



	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. CNPJ: 05.788.117/0001-03 Rua Nova esperança, 1004 - CEP: 83.324-400 Pinhais/PR - Brasil
MT135	
Berço recém nascido c/ cuna acrílica - Pintado c/	
NS:10206 - 001	ANVISA Nº: 80883970009
Resp. Técnica: Rhaissa S. T. Stokloski Crefito: 168286-F	Tel.: 41.3033.2016 www.metalicmedical.com.br metalicmedical@metalicmedical.com.br



'O fabricante se reserva o direito de alterar este manual sempre que se fizer necessário'

Responsável Técnica
Rhaissa S. Torno
CREFITO 126286 - F